


Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие)

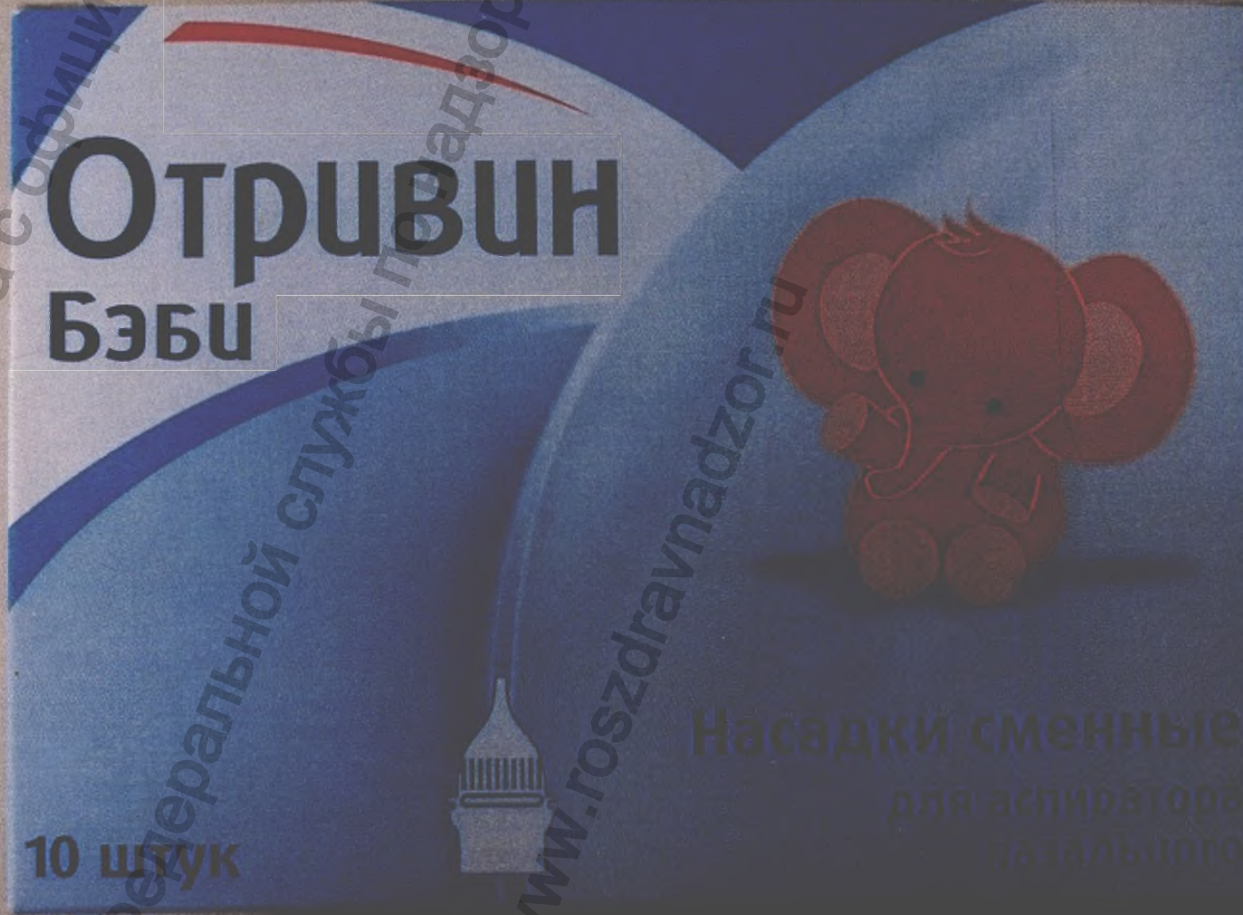

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

В упаковке содержатся десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным Отривин Бэби, который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко проникать в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что гарантирует чистое и гигиеничное использование.

Аспиратор назальный Отривин Бэби предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего детского возраста). Аспиратор очищает нос Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его слизистые выделения.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями или спреем Отривин Бэби.



Способ применения

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот для родителей и держите его над ребенком и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равновесных клапанов, пока мундштук (С) не наполнится выделениями.
4. Если насадка заполняется выделениями в процессе втягивания воздуха, выньте насадки в салфетку, прочищая мундштук, и вставьте наконечник (А) в другой носовой ход ребенка.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку.

В целях соблюдения гигиены и для предотвращения повторного инфицирования насадку следует использовать лишь один раз.



Произведено Stiplastik® - 62 Chemin des Plantées - 38160 SAINT-MARCELLIN - FRANCE

Produced by Stiplastics - 62 Chemin des Plantées - 38160 SAINT-MARCELLIN - FRANCE

Годен до:

05 2014

Серия №:

1 6 3

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdramnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru





Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)





Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru



ПРОШИТО И ОПЕЧАТАНО
ЛИСТА (-ОВ)

Верность копий документов и подлинность
оригиналов удостоверяю.

Специалист по регистрации
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»

 / Е.А.Ключко /
м.п. 05.08. 2020 г.



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru