

# ИГЛРОЛ МИНИ

## массажер медицинский

Другие продукты

### Инструкция по использованию:

**Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ** стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

### Рекомендуемые упражнения:

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

**Для массажа стоп:**

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

**Для антицеллюлитного массажа:**

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.

*За счёт более компактного размера ИГЛРОЛ МИНИ всегда удобно взять с собой.*

Массажер медицинский «Альпина Пласт» по ТУ 9098-002-1707123-2015, Регистрационное удостоверение № РЗН 1017/3255 от 09.02.2017 г., Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.

Хранение: в упаковке в виде при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и шифр изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:  
ООО «Альпина Пласт», Россия  
141800, Московская обл., Истринский р-н,  
г. Клин, Паченковская шоссе, 88 км, стр. 103  
тел.: +7 (495) 797-93-66  
www.alpinaplast.ru  
Сделано в России  
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050011012



 ALPINA  
PLAST

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.



Массажер медицинский ИГЛРОЛ



Массажер медицинский ИГЛРОЛ



Набор массажеров медицинских ИГЛРОЛ СЕТ



Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ

# ИГЛРОЛ

## массажер медицинский

Другие продукты

### Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

### Рекомендуемые упражнения:

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

### Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

### Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Массажер медицинский «Альпина Пласт» №  
ТУ 9398-022-17707123-2015,  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2011/5355 от  
09.02.2017 г.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
Не подлежит обязательной сертификации и  
декларированию в РФ.

Размер: 105\*50 мм.

Цвет: синий.

Материал: полипропиленхлоридный.  
Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до  
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при  
25°С в защищенной от прямых солнечных лучей, бензина и  
прочих растворителей среде.

Указания: использовать с осторожностью в лечебных  
учреждениях сберегающее хранение и вывоз изделия,  
потерявшего потребительские свойства (использованное  
изделие), следует утилизировать в соответствии со схемой  
обращения медицинских отходов, принятой в организации,  
осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:  
ООО «Альпина Пласт», Россия  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103  
тел.: +7 (495) 145-50-42  
[www.alpinplast.ru](http://www.alpinplast.ru)  
Сделано в России  
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050021032



 ALPINA  
PLAST

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажер  
медицинский  
ИГЛБОЛ

Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ МИНИ

Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ ФИТ

Набор массажеров  
медицинских  
ИГЛРОЛ СЕТ

# ИГЛРОЛ ФИТ

## массажер медицинский

Другие продукты

### Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

### Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью;
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

### Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

### Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Возможно использование в качестве утяжелителя во время тренировок.

Массажеры медицинские - Аल्पина Пласт - по  
ТУ 3398-022-17707123-2015.  
Регистрационное удостоверение № РОМ 2017/5355 от  
09.02.2017 г.  
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
Не подпадает под обязательный сертификации и  
декларирование в РФ.  
Размер 105\*50 мм.  
Цвет красный.  
Материал: пластик из поливинилхлоридной.

Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до  
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80%  
при 25°С в защищенном от прямого солнечного луча,  
бензина и прочих растворителей места.  
Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных  
учреждениях соблюдать строгие правила хранения и вывоз изделия,  
потерявшего потребительские свойства использованное  
изделие); следует выполнять в соответствии со схемой  
обращения медицинских отходов, принятой в организации,  
осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:  
ООО - Аल्पина Пласт - Россия  
141600, Московская обл. Клинский р-н,  
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103  
тел. +7 (495) 987-93-66  
www.alpinplast.ru  
Сделано в России  
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050031062



ALPINA  
PLAST

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

УТЯЖЕЛЁННЫЙ

Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ МИНИ

Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ

Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ

Набор массажеров  
медицинских  
ИГЛРОЛ СЕТ

#### Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ СЕТ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

#### Рекомендуемые упражнения:

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

#### Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

#### Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложение жира.

Набор объединяет преимущества ИГЛРОЛА и ИГЛРОЛА МИНИ для наибольшей эффективности.

Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по ТУ 8388-022-1720123-2016.  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от 09.02.2017 г.  
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Гарантия при хранении 2 года с даты изготовления.  
Все изделия подлежат обязательной сертификации и декларированию в РФ.  
Размер сетки ИГЛРОЛ – 10590 мм / см.  
ИГЛРОЛ МИНИ – 7940мм / желтый.  
Материал пластика поливинилхлоридный.  
Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%, при 25°С в защищенной от прямых солнечных лучей, бензина и других агрессивных веществ.  
Упаковочный элемент с этикетками отладки. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделий, подлежащих употреблению, осуществляется в соответствии с инструкцией к изделию, прилагаемой в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации осуществляющей медицинскую деятельность.  
**Производитель:**  
ООО «Альпина Пласт», Россия  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
г. Железнодорожное шоссе, 88 км, стр. 103  
тел.: +7 495 787-93-66  
www.alpinplast.ru  
сделано в России  
изготовлено

Арт. 4050041032



# ИГЛРОЛ СЕТ

набор массажеров медицинских в составе:  
ИГЛРОЛ и ИГЛРОЛ МИНИ

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

 ALPINA  
PLAST

Другие продукты



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ



Массажер  
медицинский  
ИГЛБОЛ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ МИНИ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ ФИТ



ИГЛБОЛ Ø 85  
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 85  
массажер медицинский

Инструкция по использованию

**Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 85 мм** служит верным помощником, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма. Показания: массаж рефлексогенных зон (расслабляет после травмы и операций, развитие мелкой моторики, профилактики и лечение плоскостопия, спондилита и ревматизма мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. **Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (гнойные, опоясывающие), высокая температура. **Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы). Применение изделия перед применением необходимо провести дезинфекцию способом джварного автоклавирования без газа или мылом, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 247-113). При использовании массажера изделие важно в домашних условиях подвергать обязательной обработке под струей горячей воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием. **Рекомендуемые упражнения:**  
Для улучшения кровообращения в мышцах рук, лопаточной чувствительности кисти на пальцах и различных массажных инструментах:  
- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.  
- Переключать в руках с разной интенсивностью.  
- Переключать на твердой поверхности с различной силой нажима.  
Для массажа стоп:  
- Катать то легкой, то тяжелой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.  
- Аккуратно загибать пальцами, держать и отпускать.  
Для антицеллюлитного массажа:  
- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 1741308



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей  
читайте на нашем сайте  
[www.alpina-plast.ru/ig1ball](http://www.alpina-plast.ru/ig1ball)



ИГЛБОЛ Ø 150  
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 150  
массажер медицинский



**Инструкция по применению:**

**Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 150 мм** стимулирует нервные окончания, повышает тонус, укрепляет кровоснабжение, способствует лучшему общению с окружающим миром.

**Назначение:** массаж рефлексогенных зон (ребеноческая зона в ступнях), развитие мелкой моторики, профилактика и лечение дисплазии, спазма мышц и мышечных зажимов, спондилита позвоночника, при спондилите шейно-грудного отдела позвоночника.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость любого из компонентов изделия, гипертония, онкологические заболевания, температура.

**Внимание!** Не допускать попадания воды на изделие и изделия механического повреждения (прокола, разрыва).

**Применение:** массаж проводится по показаниям при помощи дезинфицированного средства (АВУ, ДУХ, ЛУ).

При использовании массажера изделие удерживают в положении, показанном на рисунке, и делают упор ладонью одной руки на основание массажера с последующим опосредованным и опосредованным воздействием.

**Рекомендуемая температура:** 20°

Для удобства хранения изделие упаковано в защитную упаковку, которая выложена из мягкого и прочного материала.

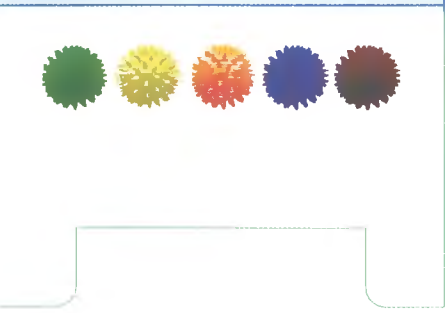
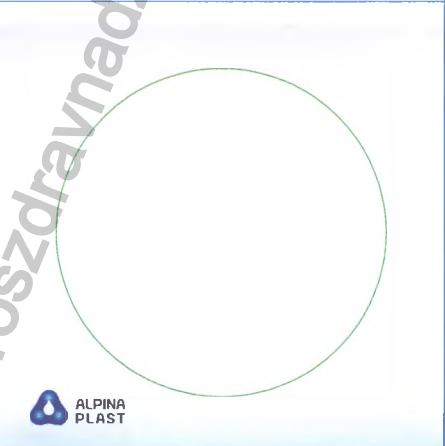
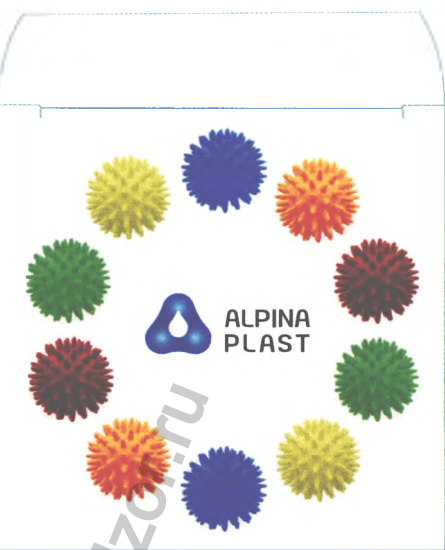
**Условия хранения:**

- Хранить в упаковке до вскрытия, не в склад, не в детей руки.
- Хранить в сухом месте.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.
- Хранить в упаковке с защитной пленкой.



Массажеры медицинские "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-17707123-2015  
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/3355 от 09.02.2017г.  
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
 Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.  
 Размер D= 150 мм.  
 Цвет синий.  
 Материал: пластик, поливинилхлоридный.  
 Хранение: в упаковке в виде при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 С в защищенном от прямых солнечных лучей, бегства и прочих неблагоприятных факторов месте.  
 Упаковка: в виде упаковки с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:

**Универсальный тренажер для всей семьи:**

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта

Новые пальчиковые игры для детей  
 читайте на нашем сайте  
[www.alpina-plast.ru/iglbol](http://www.alpina-plast.ru/iglbol)





ИГЛБОЛ Ø 180  
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 180  
массажер медицинский

Инструкция по применению

**Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 180 мм** представляет собой шарик, выполненный из мягкого, упругого гипоаллергенного материала, обладающего свойствами массажера. Назначение: массаж профессионалов для профилактики травм и спазмов, развития мелкой моторики, профилактики и лечения заболеваний, связанных с релаксацией мышечной системы (профилактика), профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушения кровообращения, острые воспалительные процессы, травмы, ожоги, обморожения, заболевания кожных покровов.

**Внимание!** Не допускать попадания воды на массажер и изделия, изготовленные из неводостойкого материала (пластик).

**Применение:** массажер используется в качестве массажного средства для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и для профилактики травм и спазмов в процессе деятельности человека (МТУ, ЗРЛ и т.д.).

При выполнении массажа массажером в области суставов, деформирующегося позвоночника под рукой следует использовать массажную подушку или массажный валик.

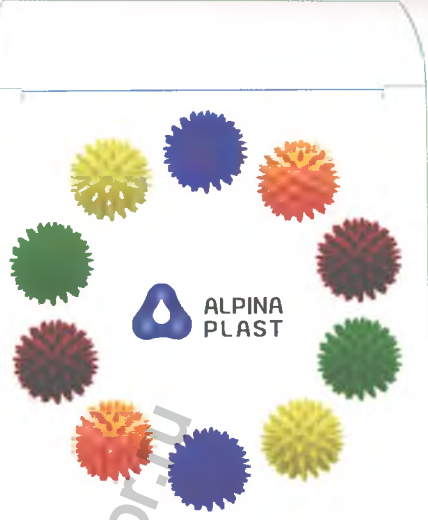
**Рекомендуемые упражнения:**

Для улучшения кровообращения в области шеи, выполняйте следующие упражнения:

- Положите массажер на затылок, шею и плечи.
- Параллельно и перпендикулярно выполняйте массажные движения.
- Перемещайте массажер по шее, плечам и воротничку рубашки.
- Для массажа лица:
- Положите массажер на лоб, перемещайте от висков к носу и подбородку.
- Для массажа шеи:
- Положите массажер на шею, перемещайте от затылка к плечам и подбородку.
- Для массажа плеч:
- Положите массажер на плечо, перемещайте от плеча к локтю и предплечью.
- При этом рекомендуется использовать массажную подушку или массажный валик.

Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9198-025-17707123-2015  
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от 09.02.2017г.  
 Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления  
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ  
 Размер: D= 180 мм  
 Цвет синий  
 Материал: пластик из поливинилхлоридный  
 Хранение: в упакованном виде при температуре от -5 до +40°С в относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бегства и прочих внешних воздействий месте.  
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и утилизация изделий, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



**Универсальный тренажер для всей семьи:**

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
- для развития мелкой моторики
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
- для профилактики и лечения плоскостопия
- при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей  
 читайте на нашем сайте  
[www.alpina-plast.ru/igball](http://www.alpina-plast.ru/igball)

РЕФЛЕКСОБОЛ МИНИ  
массажер медицинский



+0



РЕФЛЕКСОБОЛ МИНИ  
массажер медицинский

**Инструкция для пользователя:**  
**Массажер медицинский РЕФЛЕКСОБОЛ МИНИ** способствует снижению болевого синдрома, уменьшает стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Назначение:** массаж рефлексогенных зон способствует снятию усталости, развитию мелкой моторики, профилактике и лечению остеохондроза, головных и ревматических болей, улучшению кровообращения, при тахикардии, аритмии, вегетососудистой дистонии.

**Противопоказания:** нарушения целостности кожных покровов, острые заболевания кожи (фурункулы, ожоги, сыпь, дерматиты).

**Внимание!** Не допускается использование массажера с металлическими элементами (мониторинговые устройства, режущие).

**Применение:** массаж рефлексогенных зон выполняется при помощи специального массажного прорезиненного средства с эффектом массажа или массажной ролики, зонифицированного средства с МУ 287-131.

**При использовании массажера:** не следует входить в контакт с кожей, допускать попадания влаги под ступлю, использовать массажер с острым предметом, контактирующим с рефлексогенными зонами.

**Рекомендуемая температура:**  
 Для улучшения кровообращения и снятия усталости рекомендуется использовать массажер в теплом или горячем виде.  
 • Не рекомендуется использовать массажер на открытых участках тела.  
 • Не рекомендуется использовать массажер на участках тела с ожогами, порезами, царапинами, ссадинами, дерматитами и другими заболеваниями.  
 • Не рекомендуется использовать массажер на участках тела с острым воспалением.  
 • Не рекомендуется использовать массажер на участках тела с острым воспалением.  
 • Не рекомендуется использовать массажер на участках тела с острым воспалением.

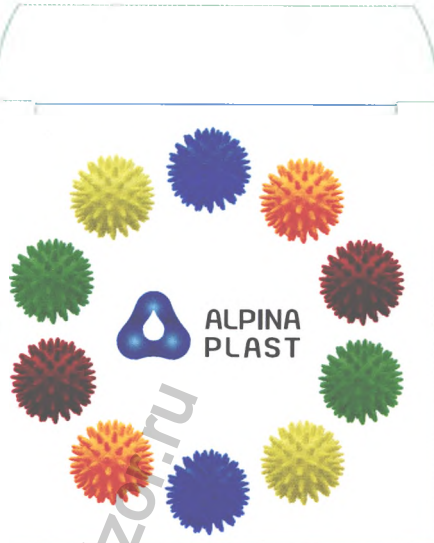


Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по ТУ 9198-022-17707124-2015  
 Регистрационное удостоверение № РЭН 2017/5355 от 09.02.2017г.  
 Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления  
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ  
 Размер D- 50 мм  
 Цвет синий  
 Материал: пластик поликарбонатный  
 Хранение: в упаковочном листе при температуре от -5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С в защищенном от прямых солнечных лучей, биопыли и вредных растительных мест.  
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 174130 8



**Универсальный тренажер для всей семьи:**

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта



Производитель:  
 ООО «Альпина Пласт», Россия,  
 141600, Московская обл., Клинский район,  
 Клин, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103  
 тел. +7 (495) 787-93-66



Сделано в России

РЕФЛЕКСОБОЛ  
массажер медицинский



РЕФЛЕКСОБОЛ  
массажер медицинский

**Назначение и применение:**  
Массажер медицинский РЕФЛЕКСОБОЛ предназначен для профилактики, лечения и реабилитации при травмах и операциях, ревматизме, миозитах, невралгиях, профурикулах и других заболеваниях, связанных с нарушением кровообращения, при артериальной гипертензии, атеросклерозе, сахарном диабете, ожогах, обморожениях, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** беременность, острые воспалительные процессы, кожные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания органов зрения, заболевания органов слуха.

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию/стерилизацию изделия по прилагаемому сертификату, но без или малом, смачивая в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-133).

При использовании массажера необходимо использовать прилагаемые подставки под ступни, чтобы избежать скольжения массажера и травмирования.

**Рекомендуемые условия применения:**  
- для применения рекомендуется использовать изделие при температуре окружающей среды +10...+40°C;  
- изделие не следует использовать на открытом воздухе;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной температурой воздуха;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной концентрацией пыли;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной концентрацией паров химических веществ;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной концентрацией газов;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной концентрацией озона;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной концентрацией радиации;  
- изделие не следует использовать в помещениях с повышенной концентрацией электромагнитных полей.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-1770123-2015  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017-5355 от 09.02.2017г.  
Гарантийный срок эксплуатации изделия со дня продажи  
Гарантийный срок хранения изделия со дня изготовления.  
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ  
Размер D= 60 мм  
Цвет синий  
Материал: полипропилен, поликарбонат  
Условиями: в сухом виде при температуре от -5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.  
Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, хранение и вывоз изделия поваряется потребностные свойства (использованное изделие) следует вывозить в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



**Универсальный тренажер для всей семьи:**

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта



Производитель:  
ООО "Альпина Пласт", Россия  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
г. Истрин, Печенковское ш., 89 в, стр. 103  
тел +7 (495) 787-93-66

[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)  
Сделано в России



# ИГЛРОЛ МИНИ

## массажер медицинский

### Инструкция по использованию:

**Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ** стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

### Рекомендуемые упражнения:

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики.**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

### Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

### Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

За счёт более компактного размера ИГЛРОЛ МИНИ всегда удобно взять с собой.

массажеры медицинские «Альпина Пласт» №  
ТУ 9398-022-1776123-2015,  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/0305 от  
09.02.2017 г.,  
Гарантийные срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Срок службы при нормальном режиме работы неограничен.  
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в  
РФ.  
Размер: 75х40 мм,  
цвет желтый.  
Материал: пластик поливинилхлоридный.  
Упаковка: в упаковке 5 шт при температуре от -10 до +40°C  
и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в  
защитном от пыли, солнечного луча, бензина и прочих  
растворителей месте.  
Утилизация: утилизировать с бытовыми отходами. В упаковке  
предоставлена информация об экологическом состоянии и вывозе изделия  
интерьерных, потребительские качества (использованное  
изделие), следует выполнять в соответствии со схемами  
определения медицинских отходов, применяемых в организации,  
осуществляющей медицинскую деятельность.

Продавец:  
ООО «Альпина Пласт», Россия  
141000, Московская обл., Климовский р-н,  
п. Д.Ю., Индустриальное шоссе, 88 км стр. 103  
тел.: +7 (4942) 22-43-94  
www.alpinaplast.ru  
Сделано в России  
ИЗГОТОВИТЕЛИ



При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.



Массажер медицинский ИГЛРОЛ



Массажер медицинский ИГЛБОЛ



Набор массажеров медицинских ИГЛРОЛ СЕТ



Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ

**Инструкция по использованию:**  
Массажер медицинский ИГПРОЛ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

**Рекомендуемые упражнения:**

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики.**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью;
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

**Для массажа стоп:**

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпустить.

**Для антицеллюлитного массажа:**

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по  
ТУ 9398-025-17707123-2015.  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от  
09.02.2017 г.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
Не подлежит обязательной сертификации и  
декларированию в РФ.

Размер: 105\*50 мм.

Цвет: синий.

Материал: полиэтиленполивинилхлоридный.

Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до  
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80%, при  
25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и  
прочих растворителей месте.

Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных  
учреждениях образцы, временное хранение и вывоз изделий,  
потерявшие потребительские свойства (использованное  
изделие), следует выполнять в соответствии со схемой  
обращения медицинских отходов, принятой в организации,  
осуществляющей медицинскую деятельность.

**Производитель:**

ООО «Альпина Пласт», Россия  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103  
тел.: +7 (485) 131-50-42  
www.alpina-plast.ru  
Сделано в России  
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050021032



4 607046 744330

# ИГПРОЛ

## массажер медицинский

Другие продукты



АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажер медицинский ИГПРОЛ

Массажер медицинский ИГПРОЛ МИНИ

Массажер медицинский ИГПРОЛ ФИТ

Набор массажеров медицинских ИГПРОЛ СЕТ

# ИГЛРОЛ ФИТ

## массажер медицинский

Другие продукты

### Инструкция по использованию:

**Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ** стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

### Рекомендуемые упражнения:

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью;
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

### Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

### Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Возможно использование в качестве утяжелителя во время тренировок.

Массажеры медицинские - Альпина Пласт - по  
ТВ 8098-022-17707123-2015.  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от  
09.02.2017 г.  
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Гарантийный срок хранения 2 года со даты изготовления.  
Не подлежит обязательной сертификации и  
декларированию в РФ.  
Размер: 105\*50 мм.  
Цвет: красный.  
Материал: поликарбонат, полиметилметакрилат.  
Хранение: в упакованной форме при температуре от +5 до  
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80%  
при 25°С в защищенной от прямых солнечных лучей,  
сырости и прочих агрессивных сред.  
Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных  
учреждениях сбор, хранение и вывоз изделия,  
подверженного повреждающим свойствам (использованное  
изделие), следует выполнять в соответствии со схемой  
обращения медицинских отходов, принятой в организации,  
осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:  
ООО «Альпина Пласт», Россия  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103  
тел.: +7 (495) 989-03-66  
www.alpinaplast.ru  
Сделано в России  
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050031062



4 607046 744347



АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

УТЯЖЕЛЁННЫЙ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ МИНИ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ



Набор массажеров  
медицинских  
ИГЛРОЛ СЕТ

# ИГЛРОЛ СЕТ

набор массажеров медицинских в составе:  
ИГЛРОЛ и ИГЛРОЛ МИНИ

Другие продукты



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ



Массажер  
медицинский  
ИГЛБОЛ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ МИНИ



Массажер  
медицинский  
ИГЛРОЛ ФИТ

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажеры медицинские «Альпина Пласт»-80  
ТУ 9398-002-17707123-2016  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/0555 от  
09.05.2017 г.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
Не подлежат обязательной сертификации и декларированию в  
РФ.

Размер изделия ИГЛРОЛ – 105\*50 мм / сантиметр,  
ИГЛРОЛ МИНИ – 75\*40 мм / сантиметр.

Материал пластмассы: полипропиленовый.  
Хранение: в упаковке при температуре от +5 до  
+40°С и относительной влажности воздуха не более 90% при  
25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, ветра и  
прочих неблагоприятных факторов.

Указания: изделие с безболезненными надавливаниями  
использовать для: укрепления здоровья и снятия мышечной  
усталости; потратительских свойств (использованное  
изделие) следует утилизировать в соответствии со схемой  
общего медицинского отходов, принятой в организации  
осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:  
ООО «Альпина Пласт», Россия  
141600, Московская обл., Климовский р-н,  
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103  
тел.: +7(495) 781-93-66

«Альпина Пласт»  
Сделано в России  
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050041032



4 607046 744354

АЛЬПИНА  
ПЛАСТ

## Инструкция по использованию:

**Массажер медицинский ИГЛРОЛ СЕТ** стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

### Рекомендуемые упражнения:

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

### Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

### Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложения жира.

Набор объединяет преимущества ИГЛРОЛА и ИГЛРОЛА МИНИ для наибольшей эффективности.



ИГЛАН  
ИГЛАН-СТИЛ

АЛЬПИНА  
ПЛАСТ

ИГЛБОЛ Ø 65  
массажер медицинский

0+

65  
мм

Инструкция по использованию  
Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 65 мм стимулирует нормальное кровообращение, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует лучшему усвоению пищи организмом.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (грибковые, онкологические), высокая температура тела.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с детьми и лицами с индивидуальными противопоказаниями (травмы, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом: два кратных промывания салфеткой из белизны или дезинфицирующим средством (МУЗ-287-113).

При использовании массажера индивидуально в домашних условиях добиться максимального эффекта под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

**Рекомендуемые упражнения:**

- Для улучшения кровообращения и снятия усталости, поместив чувствительные пальцы на пальцы и движением легкой помассировать;
- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Переключаться на твердой поверхности с различной силой нажатия.

**Для массажа стоп:**

- Жать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать;
- Для интенсивного вымывания массажи;
- Регулярно и интенсивно поглаживать массажер по области живота (сзади и спереди). При этом улучшается кровообращение и усиливается обмен веществ.

ИЗГОТОВЛЕНО:



АЛЬПИНА  
ПЛАСТ

Производитель:  
ООО «Альпина Пласт», Россия,  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
с.Крем, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103  
тел. +7 (495) 787-93-66

[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)

Сделано в России.



**Универсальный тренажер для всей семьи:**

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей  
читайте на нашем сайте  
[www.alpina-plast.ru/igball](http://www.alpina-plast.ru/igball)





информационный  
массажер медицинский  
ИГЛБОЛ Ø 120



АЛЬПИНА ПЛАСТ

ИГЛБОЛ Ø 120  
массажер медицинский

Инструкция по использованию

Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 120 мм стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.  
**Внимание!** массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травмы и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение дископатии, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (гнояные, опоясывающие) высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с иными механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом длительного пропаривания салфеткой из бумажной или марлевой смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ-287.0113).

При использовании массажера изнутри в домашних условиях допускается пропаривание изделия под струей горячей воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

**Рекомендуемый уход:**  
Для улучшения кровообращения и снятия усталости рекомендуется массажировать область ладоней и тыльную сторону кисти.

• Поочередно сводить и разводить то в одной, то в другой руке.  
• Переключать в руке фазой интенсивности.  
• Переключать на разной высоте с различной силой нажима.

Для массажа ступни:  
• Акуратно захватить стопу, держать и отпускать.

Для массажа шеи:  
• Акуратно захватить шею, держать и отпускать.

Для массажа запястий:  
• Акуратно захватить запястье, держать и отпускать.

Для массажа ладоней:  
• Акуратно захватить ладонь, держать и отпускать.

Для массажа пальцев:  
• Акуратно захватить палец, держать и отпускать.

Для массажа ногтей:  
• Акуратно захватить ноготь, держать и отпускать.

Для массажа волос:  
• Акуратно захватить волосы, держать и отпускать.

Для массажа лица:  
• Акуратно захватить лицо, держать и отпускать.

Для массажа шеи:  
• Акуратно захватить шею, держать и отпускать.

Для массажа ступни:  
• Акуратно захватить стопу, держать и отпускать.

Для массажа запястий:  
• Акуратно захватить запястье, держать и отпускать.

Для массажа ладоней:  
• Акуратно захватить ладонь, держать и отпускать.

Для массажа пальцев:  
• Акуратно захватить палец, держать и отпускать.

Для массажа ногтей:  
• Акуратно захватить ноготь, держать и отпускать.

Для массажа волос:  
• Акуратно захватить волосы, держать и отпускать.

Для массажа лица:  
• Акуратно захватить лицо, держать и отпускать.

Для массажа шеи:  
• Акуратно захватить шею, держать и отпускать.

Для массажа ступни:  
• Акуратно захватить стопу, держать и отпускать.

Для массажа запястий:  
• Акуратно захватить запястье, держать и отпускать.

Для массажа ладоней:  
• Акуратно захватить ладонь, держать и отпускать.

Для массажа пальцев:  
• Акуратно захватить палец, держать и отпускать.

Для массажа ногтей:  
• Акуратно захватить ноготь, держать и отпускать.

Для массажа волос:  
• Акуратно захватить волосы, держать и отпускать.

Для массажа лица:  
• Акуратно захватить лицо, держать и отпускать.

Для массажа шеи:  
• Акуратно захватить шею, держать и отпускать.

Для массажа ступни:  
• Акуратно захватить стопу, держать и отпускать.

ИЗГОТОВЛЕНО:



АЛЬПИНА ПЛАСТ



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей

читайте на нашем сайте

[www.alpina-plast.ru/iglbol](http://www.alpina-plast.ru/iglbol)



ИГЛБОЛ Ø 180  
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 180  
массажер медицинский

**Иструкция по использованию:**  
 Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 180 мм способствует улучшению обмена веществ, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.  
**Назначение:** массаж рефлексогенных зон (различных зон) при травмах и операциях, различные виды массажа: профилактический и лечебный (руководство «Способы массажа и техника выполнения массажных техник, улучшение кровообращения» при заболеваниях опорно-двигательного аппарата).  
**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (гнойные, гнойно-геморрагические, язвенные).

**Назначение:** Не допускается использование массажера у детей и беременных женщин (третий триместр).

**Применение:** массаж: перед началом процедуры необходимо провести дезинфекцию поверхности двух круглых прорезов салфеткой из хлопка или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 2873/13).

При использовании массажера в чаше и дозаторе в течение длительного периода хранения вложить под слой пеленки в чаше и дозаторе антисептический альбомин и прокипятить в течение 10 минут.

**Рекомендуемые упражнения:**  
 Для улучшения кровообращения в области рук: поочередно чувствительности кисти на ладонях и тыльной стороне кисти.  
 - Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.  
 - Переключать в руках с различной интенсивностью.  
 - Переключать на тыльной стороне кисти с различной силой жавания.  
 Для массажа стоп:  
 - Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.  
 - Аккуратно сжимать стопу, держать и отпускать.  
 Для массажа живота:  
 - Регулярно и интенсивно поглаживать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



ИЗГОТОВЛЕНО:



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 5198-022-1770123-2015  
 Регистрационное удостоверение № РИЗ 2017.5355 от 09.02.2017г.  
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
 Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.  
 Размер: D= 180 мм  
 Цвет синий  
 Материал: пластик под поливинилхлоридный.  
 Хранение: в упаковочной коробке при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 С в защищенном от прямых солнечных лучей, влаги и от других растительных мест.  
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, приватной в организации осуществляющей медицинскую деятельность.

**Универсальный тренажер для всей семьи:**

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
- для развития мелкой моторики
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
- для профилактики и лечения плоскостопия
- при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей  
 читайте на нашем сайте  
[www.alpina-plast.ru/igball](http://www.alpina-plast.ru/igball)

РЕФЛЕКСБОЛ МИНИ  
массажер медицинский



РЕФЛЕКСБОЛ МИНИ  
массажер медицинский

Массажер медицинский РЕФЛЕКСБОЛ МИНИ предназначен для снятия стресса, улучшения кровообращения, способности улучшить обмен кальция в костях организма.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон для снятия стресса, улучшения кровообращения, способности улучшить обмен кальция в костях организма, профилактика и лечение плоскостопия, кривошея и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (опухоль, онкологическое), высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с подвижными массажными поверхностями (гребнями, рачьями).

Применение изделия перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой или при помощи смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 247.11.1).

При использовании массажера необходимо использовать в домашних условиях промышленные изделия под струей теплой воды в течение последующего ополаскиванием и просушиванием.

**Рекомендуемые упражнения:**  
Для улучшения кровообращения в мизинце рук, ладоньями чувствительности кожи на пальцах и различных массажных комбинаций:  
•Полностью сжать и разжать до крови, то в другой руке.  
•Перекачивать в руках с разной интенсивностью.  
•Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа ступ:  
•Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.  
•Аккуратно захватывать ступню, держать и отпустить.  
•Для антицеллюлитного массажа:  
•Регулярно и интенсивно разминать массажер по областям живота, бедер, икр. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по ТУ 6198-022-17707121-2015

Регистрационное удостоверение № РИ 2017-5355 от 09.02.2017г.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня изготовления

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Размер: D= 50 мм.

Цвет: синий

Материал: пластик поливинилхлоридный.

Условия: в упаковочном виде при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С в защищенном от прямых солнечных лучей, бегина и прочих агрессивных веществ.

**Утилизация:** вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 1741308



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс

• массаж рефлексогенных зон:

- для развития мелкой моторики
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
- для профилактики и лечения плоскостопия
- при реабилитации после инсульта



УДОСТОВЕРЕНИЕ  
РОСДРАВНАДЗОРА



НЕТОКСИЧНЫЙ



ГИПО-  
АЛЛЕРГЕННЫЙ

Производитель:  
ООО «Альпина Пласт», Россия,  
141600, Московская обл., Клинский р-н,  
г. Кли, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103  
тел. +7 (495) 787-93-66

[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)

Сделано в России.

РЕФЛЕКСОБОЛ  
массажер медицинский



АЛЬПИНА  
П Л А С Т

РЕФЛЕКСОБОЛ  
массажер медицинский

**Инструкция по использованию**

Массажер медицинский РЕФ.ТЕКУ.ОБС.1 способствует нормализации психоэмоционального стресса, улучшает кровообращение, способствует снижению общего уровня напряжения.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон (ребра/бедра после травмы и операций); разрывы мышечных волокон; профилактика и лечение варикоза; атрофия и расслабление мышечной ткани; спондило-кровообращение при межпозвоночных грыжах и остеохондрозе аппарата.

**Противопоказания:** острое состояние инфаркта миокарда, инсульта, гипертонической болезни (повышенное артериальное давление); высокая температура.

**Внимание!** Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

**Применение изделия:** перед применением необходимо провести дезинфекцию способом длительного протирания салфеткой из бели или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113).

При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

**Рекомендуемые упражнения:**

**Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развитии мелкой моторики:**

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.
- Перекатывать в руках эластичный материал;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

**Для массажа лица:**

- Катать то левой, то правой рукой, по направлению от пальцев к локтю и височной;
- Аккуратно зажимать щеки, держать и отпускать.

**Для массажа конечностей:**

- Регулярно и интенсивно разминать массажер по областям живота, бедер, ищуди. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-1770123-2015  
 Регистрационный сертификат № РИИ 2017-5355 от 09.02.2017г.  
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
 Гарантийный срок хранения 2 года со даты изготовления.  
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.  
 Размер: D= 60 мм.  
 Цвет синий.  
 Материал: полипропиленовый пластик.  
 Хранение: в упаковочном виде при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, безпыля и прочих загрязнителей месте.  
 Указания: вместе с бытовыми отходами. В любом случае рекомендуется сбор, временное хранение и вывоз отходов (потребители) по правилам экологии (использовать корзину), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



АЛЬПИНА  
П Л А С Т

Промышленная  
 ООО «Альпина Пласт» Россия  
 141600, Московская обл. Клинский р.н,  
 г.Клин, Ленинградское ш., 88 км стр. 103  
 тел. +7 (495) 767-03-66

Сделано в России



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта



УДОСТОВЕРЕНИЕ  
РОСДРАВНАДЗОРА



НЕТОКСИЧНЫЙ



ГИПО-  
АЛЛЕРГЕННЫЙ

РЕФЛЕКСБОЛ МАКСИ  
массажер медицинский



РЕФЛЕКСБОЛ МАКСИ  
массажер медицинский

Изготовлено по заказу ООО «Альпина Пласт»

**Массажер медицинский РЕФЛЕКСБОЛ МАКСИ** способствует нормализации сна, снижению стресса, улучшает кровообращение, способствует снижению общего самочувствия при артрите.

**Показания:** массаж рефлексогенных зон, травматические повреждения и операции, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение подагры, отек тканей и расслабление мышечного тонуса, спондилез позвоночника, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

**Противопоказания:** нарушения целостности кожного покрова, высокая температура тела, гипертония (гипертонический криз), беременность.

**Применение:** По инструкции. Не допускать контакта массажера с открытыми незаживающими раневыми поверхностями (пролежни, ожоги).

**Примечание:** Перед применением необходимо провести дезинфекцию массажера и его протереть салфеткой из бумажного полотенца, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МД 287-12).

При использовании массажера индивидуально и ежедневно, усиливается приток крови к коже рук. Вследствие этого и массажа с использованием массажера и простимулированы рефлекторные управления:

**Для устранения кровообращения и лимфы рук, нормализации кровообращения можно по очереди и попеременно выполнять:**

- Поочередно сжимать пальцы по и назад, по и другой рукой.
- Перегибать пальцы, с разной интенсивностью.
- Перегибать их в одной плоскости с разницей одной минуты.
- Для выработки силы.
- Пальцы по очереди сжимать, по и наоборот, по и наоборот.
- Массажером захватывать ступни, держать и отпустить.
- Для выработки силы.
- Пальцы сжимать попеременно.
- Пальцы сжимать попеременно, массажер по бокам, вперед, назад. При этом использовать массажер и эффективность остальных упражнений.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-17707123-2015  
 Регистрационное удостоверение № ГИИ 2017-5355 от 09.02.2017г.  
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.  
 Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.  
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.  
 Размер: D= 75 мм.  
 Цвет синий.  
 Материал: пластик полипропиленовый.  
 Хранение: в упакованном виде при температуре от -5 до -40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С и защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.  
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, хранение, утилизация и вывоз отходов, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



4 16 07 0 4 6 1 7 4 1 3 0 6



Производитель:  
 ООО «Альпина Пласт», Россия,  
 141600, Московская обл., Клинский р-н,  
 г. Клин, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103  
 тел. +7 (495) 787-93-66

[www.alpina-plast.ru](http://www.alpina-plast.ru)  
 Сделано в России.



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
  - для развития мелкой моторики
  - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  - для профилактики и лечения плоскостопия
  - при реабилитации после инсульта





Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
*И.И. Игитов* (ов)  
Генеральный директор  
ООО «Альпина Пласт»  
И.Н. Игитов

