



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

**FRAUTEST**

*express*

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY



1  
ТЕСТ-ПОЛОСКА  
ТОЧНОСТЬ  
СВЫШЕ  
99%



Можно для определения беременности FRAUTEST express

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ



**FRAUTEST**  
*express*



1  
**ТЕСТ-ПОЛОСКА**  
**ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%**

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

**FRAUTEST**  
ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ *express*

Откройте фольгированный пакет и извлеките тест-полоску, держа ее за отмеченный конец. Опустите тест-полоску вертикально в емкость с мочой, до отметки, указанной стрелками на 10 секунд. Положите тест-полоску на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут оцените результат, но не позднее 10 минут.

**ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

Если Вам нужна помощь и консультации по вопросу интерпретированной беременности, звоните 8-800-195-44-05 (звонок по России бесплатный)



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

**FRAUTEST**

*express*

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

1  
**ТЕСТ-ПОЛОСКА**  
**ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%**

LOT: партиа №  
P: голтен (D)



В комплект входят: 1 тест-полоска (код товара: 200-80164P). Производитель: FRAUTEST (разработчик и производитель тестовых систем) AG, Германия. Адрес: FRAUTEST AG, FRAUTEST-Str. 1, D-72636 Heilbronn, Germany. Контактная информация: FRAUTEST AG, FRAUTEST-Str. 1, D-72636 Heilbronn, Germany. Контактная информация: FRAUTEST AG, FRAUTEST-Str. 1, D-72636 Heilbronn, Germany.



IVD



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

# FRAUTEST

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ



MADE IN GERMANY

*double control*



2  
ТЕСТ-ПОЛОСКИ  
ТОЧНОСТЬ  
СВЫШЕ  
99%



информация получена с официального сайта производителя

Информация получена с официального сайта производителя

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ



**FRAUTEST**  
*double control*



2

**ТЕСТ-ПОЛОСКИ**  
ТОЧНОСТЬ  
СВЫШЕ  
99%



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY



**FRAUTEST**

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

*double control*

**ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

Если Вам нужны пластыри и тест-полоски, позвоните по бесплатному номеру 8-800-100-8455 (звонок по России бесплатен).

Вскройте фольгированный пакет и извлеките тест-полоску, держа ее за крайний конец. Опустите тест-полоску вертикально в ёмкость с мочой, до отметки, указанной стрелками на 10 секунд. Поверните тест-полоску на обратную сторону. Через 3-5 минут оцените результат, но не позднее 10 минут.



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

**FRAUTEST**

*double control*

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

2  
**ТЕСТ-ПОЛОСКИ**  
ТОЧНОСТЬ  
СВЫШЕ  
99%



Позвоните по телефону 8-800-100-8455. Сайт производителя: www.frautest.ru. Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, стр. 1. Контактный телефон: 8-800-100-8455. Для заказа пластырей и тест-полосок позвоните по бесплатному номеру 8-800-100-8455. Доставка осуществляется по всей территории России. Доставка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней. Доставка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней. Доставка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней.



тест для определения беременности FRAUTEST expert



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

# FRAUTEST

*expert*



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ



MADE IN GERMANY



**1**  
ТЕСТ-КАССЕТА  
ТОЧНОСТЬ  
СВЫШЕ  
99%



Лист для определения беременности FRAUTEST expert

**ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

**FRAUTEST expert**

**1** ТЕСТ-КАССЕТА  
ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%

**15** Ультравысокая чувствительность

**2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ**

**MADE IN GERMANY**

**FRAUTEST expert**

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

**FRAUTEST expert**

**1** ТЕСТ-КАССЕТА  
ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%

**15** Ультравысокая чувствительность

**2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ**

**MADE IN GERMANY**

Заклейте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пинцет. Приложите снотест-кассету под струю мочи и нажмите. С помощью пинцета зажмите и круглой отверстие 4 капли мочи. Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут оцените результат, но не позднее 10 минут.

**ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

Если Вам нужна помощь и консультация по вопросам использования тест-кассеты, звоните 8-800-100-43-33 (звонок по России бесплатный).

CE

4 601834 003524

Регистрация МИ в Росздравнадзоре  
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения [www.fsa.gov.ru](http://www.fsa.gov.ru) FRAUTEST comfort



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ



**FRAUTEST**  
*comfort*



**1**  
**СТРУЙНЫЙ**  
**ТЕСТ**  
**ТОЧНОСТЬ**  
**СВЫШЕ**  
**99%**



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

**FRAUTEST**

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

*comfort*

**ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО**  
**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

15 ЧАСОВ ПОСЛЕ ЗАЧАТИЯ ИЛИ ОЖИДАЙТЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
**FRAUTEST**  
*comfort*

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY



**1**  
**СТРУЙНЫЙ**  
**ТЕСТ**  
**ТОЧНОСТЬ**  
**СВЫШЕ**  
**99%**



Продукция не имеет маркировки «MADE IN GERMANY» и не является продукцией Германии. Инструкция по использованию и информация о товаре на упаковке. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 °С. Не использовать после окончания срока годности. Информация о безопасности: избегать контакта с водой и другими жидкостями. Не использовать после вскрытия упаковки. Информация о производителе: ООО «НеваСерт», Россия, 410024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 125А. Контактная информация: сайт www.nevacert.ru, телефон +7 (800) 400-7127.



www.goszdravnadzor.ru  
Федеральный центр по контролю и надзору в сфере здравоохранения  
Янтарный Информационный центр



Тест для определения беременности FRAUTEST exclusive



Тесты для определения беременности FRAUTEST exclusive

Информация получена с официального сайта Минздрава РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



**FRAUTEST exclusive**

ТЕСТ-СИСТЕМА ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%

15 МИНУТ



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

**FRAUTEST exclusive**

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



MADE IN GERMANY

- Бережная упаковка, 3 теста в индивидуальной упаковке
- Работает при температуре тела, не требует предварительной подготовки
- Результат за считанные минуты
- Работает при любом положении тела
- Удобная упаковка (сleeve)

⚠ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



**FRAUTEST exclusive**

ТЕСТ-СИСТЕМА ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%

15 МИНУТ

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



**FRAUTEST exclusive**

MADE IN GERMANY

Полное наименование: «Тест-система для определения беременности «Фраутест эксклюзив»».

Содержимое: 3 теста в индивидуальной упаковке, инструкция по применению, инструкция по использованию, инструкция по транспортировке и хранению.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Срок использования: с момента вскрытия упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5 до +25 °С, в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Условия транспортировки: при температуре от +5 до +25 °С.

Место хранения: в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Место использования: при температуре от +5 до +25 °С, в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Место транспортировки: при температуре от +5 до +25 °С.



тест для определения овуляции FRAUTEST ovulation



Вместо для определения овуляции FRAUTEST ovulation

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ



FRAUTEST ovulation

5 ТЕСТ ПОЛОСОК + ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МОЧИ



ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY

FRAUTEST ovulation

Вскрыть фольгу и использовать тест-полоску, лежащую на заворачиваемой крышке. Другая тест-полоска лежит в емкости с мочой, до отметки, указанной стрелками на 10 секунд. Поместить тест-полоску на пропитательную среду пометки. Через 10 минут оценить результат.



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

FRAUTEST ovulation

ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY

5 ТЕСТ ПОЛОСОК + ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МОЧИ



Полное наименование: Фольгированный картонный контейнер (5х1) FRAUTEST ovulation. Производитель: Nevacert GmbH, Германия. Адрес: ...



Набор тестов для определения овуляции и беременности FRAUTEST планинг



Винненедко овредте еден...  
 набор тестов для определения овуляции и беременности  
 набор тестов для определения овуляции и беременности  
 набор тестов для определения овуляции и беременности

НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ И БЕРЕМЕННОСТИ



FRAUTEST *planning*

5 ТЕСТ ПОЛОСК + 2 ТЕСТА НА БЕРЕМЕННОСТЬ



ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY

FRAUTEST *planning*

НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ И БЕРЕМЕННОСТИ

Этот тест определяет наличие беременности в течение 10 минут. Он прост в использовании и не требует специальных навыков. Для получения точных результатов необходимо строго следовать инструкции. Срок годности: 18 месяцев.

ОБРАТНО ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫМАТЕЛЬНО



НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ И БЕРЕМЕННОСТИ  
 FRAUTEST *planning*

ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY



Срок годности: 18 месяцев. Для получения точных результатов необходимо строго следовать инструкции. Срок годности: 18 месяцев.

MADE IN GERMANY

5 ТЕСТ ПОЛОСК + 2 ТЕСТА НА БЕРЕМЕННОСТЬ



серия: MF  
 год: до



го прошито, пронумеровано  
креплено печатью:  
Четырнадцать листа(ов)  
Генеральный директор  
ООО "БОЛЕАР"  
И. Денисов



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru