



АЛЬПИНА  
ПЛАСТ

Круг медицинский подкладной Ø39 см  
Соответствует ТУ 12.50.50-043-17707123-2019,  
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"  
Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103  
Дата производства: 08.19.Партия: 191  
Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления  
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи  
Срок годности: условия не установлены



АЛЬПИНА  
ПЛАСТ

Круг медицинский подкладной Ø45 см  
Соответствует ТУ 32.50.50-043-17707123-2019,  
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"  
Адрес: 141603, Россия, Московская область, Клин, Дачно-прокатное  
подъезд, 88 км, строение 103  
Дата производства: 08.09.2024г. 19С  
Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления  
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи  
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления



**КРУГ МЕДИЦИНСКИЙ  
ПОДКЛАДНОЙ**  
Ø 39 см




Исполнитель: ООО «Альпина Пласт», г. Кинешма,  
Рязань, 141603, Мясниковская область,  
Ленинградское шоссе 88 км. стр. 103,  
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 131-50-42/43,  
www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru  
**СДЕЛАНО В РОССИИ.**

Арт. 5090391032



4 607046 74 1097

КРУГ МЕДИЦИНСКИЙ  
ПОДКЛАДНОЙ «Альпина Пласт»  
Ø 39 см

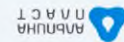

**КРУГ МЕДИЦИНСКИЙ  
ПОДКЛАДНОЙ**  
Ø 39 см



**RUS** Круг медицинский подкладной Ø39 см.

Круг медицинский подкладной (далее круг подкладной «Альпина Пласт») предназначен для медицинских и профилактических целей в лечебных учреждениях и в домашнем использовании: для лечения и профилактики пролежней, стимуляции и релаксации мышечных тканей, улучшения кровообращения.

Показания: при уходе за больными со склонностью или с уже образовавшимися пролежнями; ослабление нагрузки после операций на прямой кишке, ушибе копчика; ослабление нагрузки на промежность при геморрое; ослабление нагрузки при состоянии после эпизиотомии.

Противопоказания: отсутствуют.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

**Дезинфекция:** перед использованием круг подкладной продезинфицируйте методом погружения в 3% раствор хлорамина на 60 минут (предварительно закрыв воздушный клапан). При использовании одним пациентом, дезинфекцию проводите протиранием изделия салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором хлорамина. По окончании дезинфекционной выдержки круг подкладной промойте проточной питьевой водой и просушите.

**Использование изделия:** перед применением круг подкладной надуйте ртом (предварительно протерев клапан салфеткой) до упругого, но не жесткого состояния, закройте воздушный клапан и вдавите его внутрь круга. Круг подкладной разместите на поверхности стула или кровати подложив его под участок тела, испытывающий нагрузку, накройте круг пленкой. При использовании для тяжелобольных: подкладной круг помещают под простыню (или пленкой) так, чтобы подвергающийся давлению участок тела (обычно крестец) находился над отверстием круга. После применения круг подкладной промойте горячей водой с использованием мыльного раствора и просушите.

**Условия хранения:** круги подкладные следует хранить в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 30% при 25°C. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

**Утилизация:** при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации вместе с коммунальными отходами.

При использовании в лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А медицинских отходов согласно СанПиН 2.1.7.2790.

Круг медицинский подкладной по ТУ 32.50.50-043-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение №


Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

Срок годности/службы не установлен.

Изготовлено:

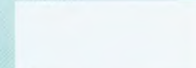

1001

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

3 (три)

листа(ов)

Генеральный директор  
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Чеутов

