

Макеты упаковки

**Пенал для лекарственных препаратов –
«Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014**

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdrazhnadzor.gov.ru

2023

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Основные параметры изделия: длина — (60±5) мм; ширина — (60±5) мм; высота — (17±3) мм; масса не превышает 100 г.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Тиснение ■ ■ ■ ■ СМΥК

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день

Инструкцию по применению смотри на внутренней части упаковки.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Пенал для лекарственных препаратов — «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день».

Правообладателем товарного знака «Wellfix» является ООО «ИРИС».

Производитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Сделано в России
Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.

WELLFIX

Таблетница
на один день

WELLFIX


Таблетница на один день



УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ

WELLFIX

Таблетница
на один день

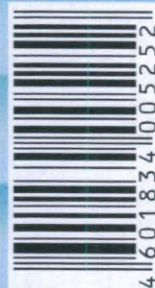

Дата производства

Партия №

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день

Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Основные параметры изделия: длина — (60±5) мм; ширина — (60±5) мм; высота — (17±3) мм; масса не превышает 100 г.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкцию по применению смотри на внутренней части упаковки.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Пенал для лекарственных препаратов — «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней».

Правообладателем товарного знака «Wellfix» является ООО «ИРИС».

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 83 км, к. 3А, стр. 103Б.

Сделано в России

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней



Дата производства

LOT: Партия №

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15 ± 5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Условия хранения: в помещении при температуре от $+5$ до $+40^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Основные параметры изделия: длина — (150 ± 5) мм; ширина — (33 ± 5) мм; высота — (25 ± 3) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкция по применению смотри на внутренней части упаковки.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня получения потребителем.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Пенал для лекарственных препаратов — «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней».

Правообладателем товарного знака «Wellfix» является ООО «ИРИС».

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Сделано в России

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней



УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ

Дата изготовления:

№ серии:

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут, или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Основные параметры изделия: длина — (150±5) мм; ширина — (33±5) мм; высота — (25±3) мм; масса не превышает 100 г.

Лицо

Оборот

RU Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
 Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.
 Для слепки и маркировки на краяхах отделившей надписи в виде вытиски самозолва зубки 50мкм.
 Показание необходимости упорядоченного режимного приема твердых лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.
Инструкция по применению: находится на внутренней стороне упаковки.
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/0549 от 15.07.2001 г.
Гарантийный срок годности: 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год со дня получения потребителем.
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Издание соответствует требованиям: ТУ 9398-019-17707123-2014.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б, тел.: +7 (495) 181-50-42.
Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru
Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР Беллар», 220124, г. Минск, ул. М. Лямбика, д. 123 Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.
Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казак», Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2, тел.: +7 (727) 313-34-21.
 Создано в России.



ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ НА ОДИН ДЕНЬ

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ НА ОДИН ДЕНЬ

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ НА ОДИН ДЕНЬ

www.pilula.info

Дата производства

Партия №

4 601834 000447

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
Инструкция по применению

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из 4-х отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина – (60±5) мм; ширина – (60±5) мм; высота – (17±8) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделий, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Пенал для лекарственных препаратов – «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014».

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б, тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66, Email: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru
Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Информация получена с официального сайта
 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
 www.goszdravnadzor.gov.ru

Таблетница ПИЛОПР на 7 дней «Организер»
 Медицинский прибор, предназначенный для удобства, удобства приема и контроля приема лекарственных препаратов. Предназначен для использования в домашних условиях. Показание: удобство приема лекарственных препаратов. Предназначен для использования в домашних условиях.

Показания: удобство приема лекарственных препаратов. Предназначен для использования в домашних условиях.

Противопоказания: нет.


Состав: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.

Формы выпуска: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.

Классификация: СИД 4543191012021.

История: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.

Сделано в России.

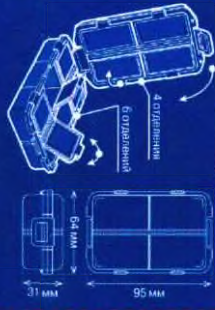

ТАБЛЕТНИЦА
ПИЛОПР
 НА 7 ДНЕЙ
 «ОРГАНИЗЕР»

ТАБЛЕТНИЦА
ПИЛОПР
 НА 7 ДНЕЙ
 «ОРГАНИЗЕР»

ТАБЛЕТНИЦА
ПИЛОПР
 НА 7 ДНЕЙ
 «ОРГАНИЗЕР»



www.pilo.ru



Таблетница ПИЛОПР на 7 дней «Организер»
Инструкция по применению

Таблетница ПИЛОПР на 7 дней «Организер» предназначена для удобства приема лекарственных препаратов. Предназначена для использования в домашних условиях. Показание: удобство приема лекарственных препаратов. Предназначен для использования в домашних условиях.

Показания: удобство приема лекарственных препаратов. Предназначен для использования в домашних условиях.

Противопоказания: нет.

Состав: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.

Формы выпуска: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.


Классификация: СИД 4543191012021.

История: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.

Сделано в России.

Использование: Таблетница предназначена для удобства приема лекарственных препаратов. Предназначена для использования в домашних условиях. Показание: удобство приема лекарственных препаратов. Предназначен для использования в домашних условиях.

История: 1 шт. Упаковка: картонная коробка с окном для информации о препарате.

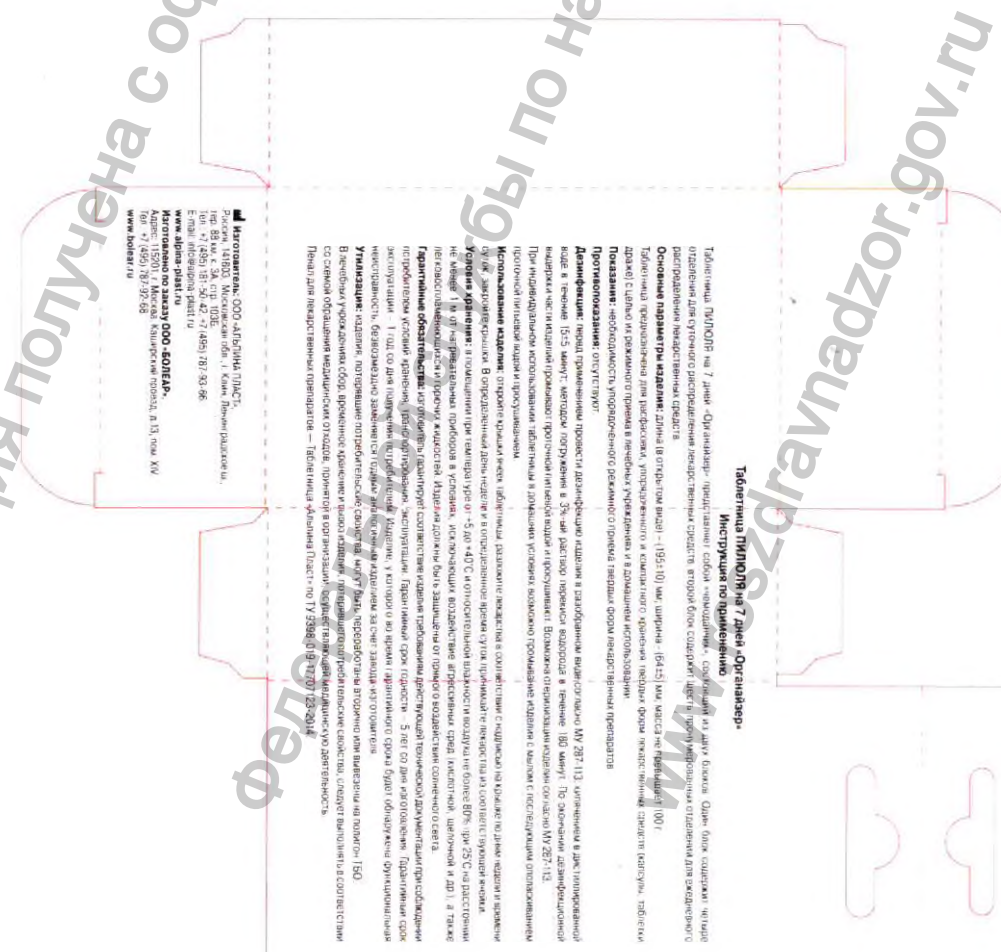

RU Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Организер»

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Правильный срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Позитивный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.

■ Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 161-50-42.

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казмед».

050016, Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2. Тел.: +7 (727) 313-34-21.

Сделано в России.

Номинальные размеры изделия:



ТАБЛЕТНИЦА

ПИЛЮЛЯ

НА 7 ДНЕЙ
«ОРГАНИЗЕР»

ТАБЛЕТНИЦА

ПИЛЮЛЯ

НА 7 ДНЕЙ «ОРГАНИЗЕР»

ТАБЛЕТНИЦА

ПИЛЮЛЯ

НА 7 ДНЕЙ
«ОРГАНИЗЕР»



www.pilula.info

Дата производства

LOT Партия №

**Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Органайзер»
Инструкция по применению**

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Органайзер» представляет собой «чемоданчик», состоящий из двух блоков. Один блок содержит четыре отделения для суточного распределения лекарственных средств, второй блок содержит шесть пронумерованных отделений для ежедневного распределения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина (в открытом виде) – (195±10) мм; ширина – (64±5) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели и времени суток, закройте крышки. В определенный день недели и в определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Гарантийные обязательства: изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, эксплуатации. Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем. Изделие, у которого во время гарантийного срока будет обнаружена функциональная неисправность, безвозмездно заменяется годным аналогичным изделием за счет завода-изготовителя.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Пенал для лекарственных препаратов – Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км. к. 3А, стр. 103Б
Тел.: +7 (495) 181-50-42; +7 (495) 787-93-66
E-mail: info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru
■ **Изготовлено по заказу** ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13, пом. XIV
Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ЛИЦО

ОБОРОТ

ВУ Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Для зрения и слабовидящих на крышках отделения нанесены надписи в виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют. Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.

Регистрационное удостоверение: № ФСН 2019-02349 от 15.07.2020 г.

Гарантийный срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-019-17107123-2014.

Иготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел: +7 (495) 181-50-42.

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru
Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР» Бийск, 220124, г. Минск, ул. М. Рыльского, д. 123 Б, каб. 4. Тел: +375 (171) 573-83-20.

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казахстан», Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2. Тел: +7 (727) 313-24-21.

Сделано в России.
Номинальные размеры изделия:



ТАБЛЕТНИЦА
ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА
ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА
ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

НА 7 ДНЕЙ



www.pilula.info

Pantone 300 c

Данная информация

Патент №

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней
Инструкция по применению**

Таблетница представляет собой лоток, состоящий из семи отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина - (150±5) мм; ширина - (33±5) мм; высота - (25±3) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Пенал для лекарственных препаратов – «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014».

Иготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66. Email: info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru
Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

www.roszdravnadzor.gov.ru

ЛИЦО

RU Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Для слепых и слабовидящих на крышках отделений нанесены надписи в виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Гарантийный срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 181-50-42.

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.


www.bolear.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казмед», Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2. Тел.: +7 (727) 313-24-21.

Сделано в России.

Номинальные размеры изделия:

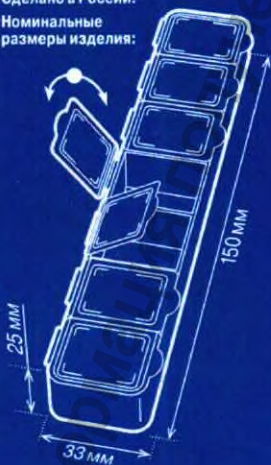

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ Л Ю Л Я
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ Л Ю Л Я
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ Л Ю Л Я
НА 7 ДНЕЙ



www.pilula.info

Дата производства



Партия №

Pantone 300 c

ОБОРОТ

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней
Инструкция по применению

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из семи отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина – (150±5) мм; ширина – (33±5) мм; высота – (25±3) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Пенал для лекарственных препаратов – «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014».

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603,
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66. Email: info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу ООО «БОЛГАР».

Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolgar.ru

**Пенал для лекарственных препаратов—
«Таблетница «Альпина Пласт»
по ТУ 9398-019-17707123-2014
«Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день»**

Инструкцию по применению смотри на внутренней части упаковки. Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях. Для слепых и слабовидящих людей на крышках отдельных отделений нанесены надписи в виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Материал изделия: полипропилен. Количество: 1 шт

Соответствуют требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014. Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем.

Противопоказания: отсутствуют.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103 Б. Сделано в России.
Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV.

Изготовлено для: АО «ТАНДЕР» 350002, Россия, г. Краснодар,

ул. Леваневского, 185,
тел./факс: (861) 210-98-10,
e-mail: info@magnit.ru.


Отзывы о продукции принимаем по телефону горячей линии:
8 800 200 900 2 Звонок бесплатный



4 601834 006334

ЗДОРОВЬЕ

ТАБЛЕТНИЦА на один день

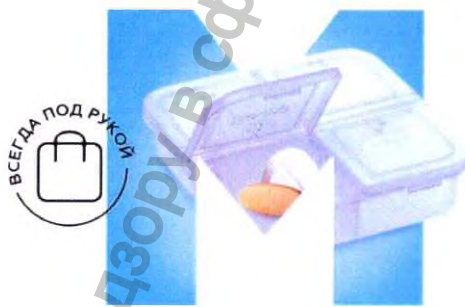

ЗДОРОВЬЕ

**ТАБЛЕТНИЦА
на один день**

Дата изготовления:

Партия №

ЛИЦО

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Основные параметры изделия: длина – (60±5) мм, ширина – (60±5) мм, высота – (17±3) мм, масса не превышает 100 г

ОБОРОТ

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ НА ОДИН ДЕНЬ
Инструкция по применению (продолжение)

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113. При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.gov.ru

Таблетница на один день

Почта для лекарственных препаратов -
«Таблетница «Альпина Пласт» по
ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница
ПИЛЮЛЯ на один день»

Инструкция по применению:
Таблетница предназначена для
расфасовки, упорядоченного
и компактного хранения
твердых форм лекарственных
средств (капсулы, таблетки,
драже) с целью их режимного
приема в лечебных учреждениях
и в домашних условиях.

Для слепых и слабовидящих
людей на крышках отделений
нанесены надписи в виде
выпуклых символов азбуки
Брайля.

Показания: необходимость
упорядоченного режимного
приема твердых форм
лекарственных препаратов.

Противопоказания:
отсутствуют.

Дезинфекция: смотри внутри
упаковки.

Использование изделия: откройте крышки ячеек
таблетницы, разложите лекарства в соответствии с
надписью на крышке согласно времени суток, закройте
крышки. В определенное время суток принимайте
лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до
+40°C и относительной влажности воздуха не более 80%
при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов в условиях, исключающих воздействие
агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия
должны быть защищены от прямого воздействия
солнечного света.

Утилизация: смотри внутри упаковки.
Материал: полипропилен

Гарантийный срок годности — 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения
потребителем.

Соответствуют требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2549 от
15.07.2020 г. Не подлежит обязательной сертификации и
декларированию в РФ.

Изготовитель и организация, уполномоченная на принятие претензий от
потребителя в РФ: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141601, Московская обл., г.
Клин, Ленинградский, д. 68 км. 3А, стр. 103Б (индустриальный
зона) Россия, 141603, М.о. Клин, Ленинградский, д. 68 км. 3А,
стр. 103Б) www.nevacert.ru | info@nevacert.ru
Дистрибьютор: С

таблетница

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

РЯДОМ С КАЖДЫМ



таблетница


4 601834 005



Утилизация: смотри внутри упаковки.

Изготовлено по заказу: ООО «ТРАНССТОЯМАРКЕТ»,
660118, г. Красноярск, Северное шоссе, зд. ШМ/1, пом. 2,
тел.: +7 (391) 205-11-80

Таблетница
на один день

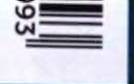

Дата изготовления

Партия №

Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору

www.goszdramadzor.gov.ru

ВАХОХРАНЕНЫЯ

Таблетница на 7 дней

Пенал для лекарственных препаратов -
«Таблетница «Альпина Пилосля» по
ТУ 9398-019-17707125-2014
«Таблетница ПИЛОСЛЯ на 7 дней»

Инструкция по применению.
Таблетница предназначена
для расфасовки, упорядоченного
и компактного хранения твердых
форм лекарственных средств (таблетки,
таблетки, драже) с целью их режимного
применения в лечебных учреждениях и в
домашних условиях.

Для слепых и слабовидящих людей на
крышках отделений нанесены надписи в
виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Показания: необходимость
упорядоченного режимного приема
твердых форм лекарственных
препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Использование изделия: откройте
крышки пенала таблетниц, разложите
лекарства в соответствии с надписью на
крышке по дням недели, закройте
крышки. В определенную ночь недели
принимайте лекарства из
соответствующей ячейки.

Условия хранения: в помещении
при температуре от +5 до +40°C и
относительной влажности воздуха
не более 80% при 25°C, на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных
приборов

в условиях, исключающих воздействие
агрессивных сред (кислотной, щелочной
и др.), а также легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей. Изделие должно
быть защищено от прямого воздействия
солнечного света.

Дезинфекция: смотри внутри упаковки.

Утилизация: смотри внутри упаковки.

Материал: полипропилен

Гарантийный срок годности — 5 лет со
дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год
со дня получения потребителем.

Соответствует требованиям

ТУ 9398-019-17707125-2014.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.

**Изготовитель и организация,
уполномоченная на принятие претензий от
потребителя в РФ:** ООО «Альпина Пилосля»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б
(адрес производства, Россия, 141603,
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б)

Дистрибутор: ООО «БОЛЕАР», 115201,
г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел. +7 (495) 787-92-66.

Изготовлено по заказу:
ООО «ТРАНСИСТРИМАРИЕТ», 660118,
г. Красноярск, Северное шоссе, зд. 11в/1,
пом. 2, тел. +7 (391) 205-11-80

ТАБЛЕТНИЦА

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
«Рядом с каждым»



ТАБЛЕТНИЦА



Таблетница на 7 дней

Дата изготовления
Партия №

Таблетница
ПИЛЮЛЯ
на 7 дней

Инструкция по применению
(продолжение)

Дезинфекция:

Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15+5 минут, или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113. При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Утилизация:

Изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Информация получена

льного са

надзору в сфере

губернских аптек

Таблетница на 7 дней

Пенал для лекарственных препаратов - «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней»

Инструкция по применению.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Для слепых и слабовидящих людей на крышках отделений нанесены надписи в виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных

Против **Регистрация МИ в Росздравнадзоре**
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

таблет

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
«РЯДОМ С КАЖДЫМ»




таблет

ТНИЦА



Таблетница
на 7 дней

ТНИЦА

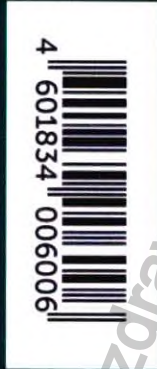

Используя таблетницу, разложите
лекарства в соответствии с надписью на
крышке по дням недели, закройте
крышки. В определенный день недели
принимайте лекарства из
соответствующей ячейки.

Условия хранения: в помещении
при температуре от +5 до +40°C и
относительной влажности воздуха
не более 80% при 25°C на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных
приборов
в условиях, исключающих воздействие
агрессивных сред (кислотной, щелочной
и др.), а также легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей. Изделия должны
быть защищены от прямого воздействия
солнечного света.

Дезинфекция: смотри внутри упаковки.

Утилизация: смотри внутри упаковки.

Материал: полипропилен

Гарантийный срок годности — 5 лет со
дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год
со дня получения потребителем.

Соответствуют требованиям
ТУ 9398-019-17707123-2014.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.

**Изготовитель и организация,
уполномоченная на принятие претензий от
потребителя в РФ:** ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б
(адрес производства: Россия, 141603,
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б)

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201,
г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68.

Изготовлено по заказу:
ООО «ТРАНСТОРГМАРКЕТ», 660118,
г. Красноярск, Северное шоссе, зд. 11и/1,
пом. 2, тел.: +7 (391) 205-11-80

Дата изготовления

Партия №

Информация

Федер

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.gov.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альбина Пласт»
Е.Н. Игутов



Фото медицинского изделия с упаковкой
Пенал для лекарственных препаратов –
«Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdravnadzor.gov.ru

2023

«янаб нтоо нн влрлвнн злнлндо»



"Таблетки ПИЛОД на 4 дня"

Янв



“Таштукта ПИМОНА МИ Т ГИМ” “Орманкер”



Янина









ЕНИЯ




ТАБЛЕТНИЦА

П И Л Ю Л Я


НА 7 ДНЕЙ



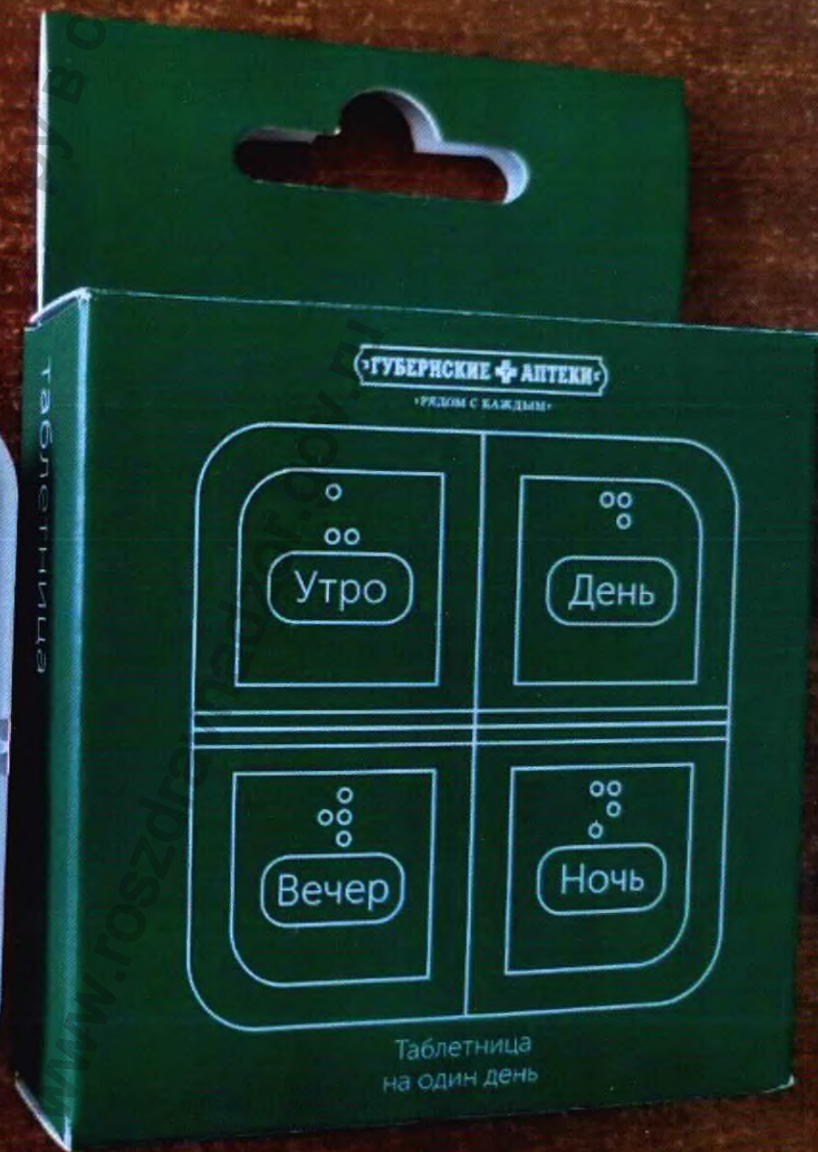



«ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»
«РАДОМ С КАЖДЫМ»

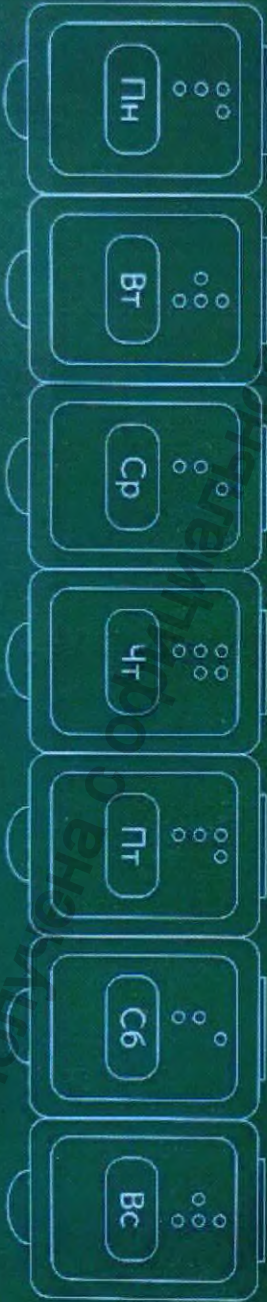

Таблетница
на 7 дней



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
Е.Н. Игутов (ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е.Н. Игутов