

ИГЛРОЛ МИНИ

массажер медицинский

Другие продукты

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.

За счёт более компактного размера ИГЛРОЛ МИНИ всегда удобно взять с собой.

Массажер медицинский «Альпина Пласт» по ТУ 9098-002-1707123-2015, Регистрационное удостоверение № РЗН 1017/3255 от 09.02.2017 г., Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.

Хранение: в упаковке в виде при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и шифр изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия
141800, Московская обл., Истринский р-н,
г. Клин, Паченковская шоссе, 88 км, стр. 103
тел.: +7 (495) 797-93-66
www.alpinaplast.ru
Сделано в России
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050011012



 ALPINA
PLAST

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.



Массажер медицинский ИГЛРОЛ



Массажер медицинский ИГЛРОЛ



Набор массажеров медицинских ИГЛРОЛ СЕТ



Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ

ИГЛРОЛ

массажер медицинский

Другие продукты

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Массажер медицинский «Альпина Пласт» №
ТУ 9398-022-17707123-2015,
Регистрационное удостоверение № РЗН 2011/5355 от
09.02.2017 г.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.
Не подлежит обязательной сертификации и
декларированию в РФ.

Размер: 105*50 мм.
Цвет: синий.

Материал: полипропиленхлоридный.
Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при
25°С в защищенной от прямых солнечных лучей, бензина и
прочих растворителей среде.

Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных
учреждениях соблюдать хранение и вывоз изделия,
потерявшего потребительские свойства (использованное
изделие), согласно методике и соответствии со схемой
обозначения медицинских отходов, принятой в организации,
осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия
141600, Московская обл., Клинский р-н,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103
тел.: +7 (495) 145-50-42
www.alpinplast.ru
Сделано в России
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050021032



АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажер медицинский ИГЛБОЛ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ

Набор массажеров медицинских ИГЛРОЛ СЕТ

ИГЛРОЛ ФИТ

массажер медицинский

Другие продукты

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Возможно использование в качестве утяжелителя во время тренировок.

Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по ТУ 3398-022-17707123-2015.
Регистрационное удостоверение № РОМ 2017/5355 от 09.02.2017 г.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.
Не подпадает под обязательный сертификации и декларирование в РФ.
Размер 105*50 мм.
Цвет красный.

Материал: пластик из поливинилхлоридной.
Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей места.
Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях соблюдать строгое хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия
141600, Московская обл. Клинский р-н,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103
тел. +7 (495) 987-93-66
www.alpinaplast.ru
Сделано в России
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050031062



ALPINA
PLAST

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

УТЯЖЕЛЁННЫЙ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ

Набор массажеров медицинских ИГЛРОЛ СЕТ

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ СЕТ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложение жира.

Набор объединяет преимущества ИГЛРОЛА и ИГЛРОЛА МИНИ для наибольшей эффективности.

ИГЛРОЛ СЕТ

набор массажеров медицинских в составе:
ИГЛРОЛ и ИГЛРОЛ МИНИ

Другие продукты

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажер медицинский ИГЛРОЛ

Массажер медицинский ИГЛБОЛ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ

Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по ТУ 9388-022-1720123-2016.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от 09.02.2017 г.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
Гарантиция при хранении 2 года с даты изготовления.
Все изделия подлежат обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Размер цвет ИГЛРОЛ – 10590 мм / синий.
ИГЛРОЛ МИНИ – 7940мм / желтый.
Материал пластика поливинилхлоридный.
Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%, при 25°С в защищенной от прямых солнечных лучей, бензина и других агрессивных веществ.
Упаковочный элемент с этикетками отладки. В производственном учреждении сбор, временное хранение и вывоз изделия, поддержание потребительских свойств (использование изделия), хранение, выполнение в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятая в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.
Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия
141600, Московская обл., Клинский р-н,
г. Железнодорожное шоссе, 88 км, стр. 103
тел.: +7 495 787-93-66
www.alpinplast.ru
сделано в России
изготовлено

Арт. 4050041032



ALPINA PLAST

Информация получена от официального дилера Альпина Пласт по надзору в сфере

ИГЛБОЛ 65
массажер медицинский



ИГЛБОЛ 65
массажер медицинский


Инструкция по использованию
Массажер медицинский ИГЛБОЛ 65 мм служит при травмах и отеках, помогает снять нагрузку, и обладает противовоспалительным действием, улучшает кровообращение, способствует снижению болевого синдрома.
Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций), разрывы менисков, артропатии и лечение плоскостопия, стеноз локтевого сустава, мышечные судороги, улучшение кровообращения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Противопоказания: местное применение на открытых раневых, гнойных, воспалительных очагах (фурункулы, абсцессы), местной температуре тела выше 40°C.
Внимание! При длительном использовании массажера в состоянии мышечного гипертонуса (спазмированности) необходимо снизить нагрузку (размером).
Применение и уход: перед применением необходимо протестировать индивидуальный способ воздействия: процедура проводится в течение 15 минут, с небольшой нагрузкой, декомпрессивной скоростью (AU 25,113). При использовании массажера необходимо в дальнейшем постепенно дозировать количество воздействий (время воздействия) в зависимости от индивидуальных особенностей и ощущений.
Рекомендуемые упражнения:
 - Для улучшения кровообращения и массажа рук, вымытые ладони положить на локотки и длительно массировать локотки.
 - Поочередно сжимать и разжимать то л ладонь, то в другой руке.
 - Переключать в руках с разной интенсивностью.
 - Переключать на твердой поверхности с различной силой нажима.
Для массажа стоп:
 - Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.
 - Аккуратно зажимать стопы, держать и отпустить.
 - Для антивибрирующего массажа.
 - Регулярно и интенсивно нажимать массажер по области ладоней, сжатых пальцев. При этом улучшается кровообращение и уменьшается утомляемость.




4607046740806

Медицинские изделия (Лицензия № 50.01.016642:1701.2018)
Регистрационное удостоверение № 78/014/018/2018/01/01/18/001
 Регистрационный номер **ИГЛБОЛ 65**
 Регистрационный срок **5 лет** с даты окончания
 Регистрационный срок **05.03.2023**

ИЗГОТОВЛЕНО.

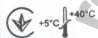 +5°C - +40°C

ALPINA PLAST



ALPINA PLAST


www.alpina-plast.ru

Производитель:
 ООО «Альпина Пласт», Россия
 141200, Московская обл., Клинский р-н,
 г. Клин, Ленинградское ш., 85 км стр. 103
 тел. +7 (495) 787-93-66

www.alpina-plast.ru
 Сделано в России.

Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
 читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/igball

ИГЛБОЛ Ø 85
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 85
массажер медицинский

0+

85
MM

Инструкция по использованию

Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 85 мм служит верным помощником, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма. Показания: массаж рефлексогенных зон (релаксация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (грибные, опоясывающие), высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Перед применением изделия перед применением необходимо провести дезинфекцию способом джварного автоклавирования без газа или мылом, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 247-113).

При использовании массажера изделие вводят в доминирующую сторону, аккуратно сжимая изделие над струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, лопаточной чувствительности кисти на пальцы и различные носовой кончики.

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.

- Переключать в руках с разной интенсивностью.

- Переключать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Катать то легкой, то тяжелой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.

- Аккуратно захватывать пальцами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 1741308



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/iglbali

ИГЛБОЛ Ø 120
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 120
массажер медицинский

Министерство здравоохранения РФ
Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 120 мм предназначен для проведения массажных процедур при стрессе, участии травматических повреждений, улучшении общего состояния организма. Показан при рефлекторных эпилептиках после травмы и спазмов, развитии мышечной дистрофии, профилактики и лечении заболеваний, стимуляции и регуляции мышечных тканей у пациентов артериальной гипертензией, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Противопоказан при беременности, заболеваниях сосудов, кожных заболеваниях, в период обострения хронических заболеваний, острых инфекционных заболеваний, повышенной температуре тела. Применение: массаж проводят в положении пациента лежа на спине, перед началом массажа необходимо провести дезинфекцию способом длительного протирания спиртом 70% или марлею, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МДП 287-1-13). При использовании массажера необходимо в начале и до окончания сеанса прерывание процедуры под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием. Рекомендации: Утилизация. Для утилизации необходимо использовать специальную точку приема, так как материал чувствителен к воздействию влаги и ультрафиолетовому излучению. Для массажа: *Паттерны можно вращать по и против часовой стрелки. *Переключать режим работы массажера. *Переключать на твердые поверхности с различной степенью жесткости. *Катаить по коже, по направлению от пальцев к ладони и наоборот. *Аккуратно захватывать пальцы, держать и отпускать. Для детей: *Рекомендуется показывать массажер по области живота, бедер, ягодиц. При этом учитываются возрастные особенности и уменьшается отдача кисти.



ИЗГОТОВЛЕНО:



Массажеры медицинские "Альпина Пласт" по ТУ 9198-022-1770123-2015
Регистрационное удостоверение № РИИ 2017/3355 от 09.02.2017г.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продаж.
Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Размер: D= 120 мм.
Цвет синий.
Материал: пластик полипропиленовый.
Условия: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, без пыли и прочих растворителей месте.
Этикетирование: вместе с обязательными этикетками. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз отходов, отсортированных по потребительским свойствам (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/iglball

ИГЛБОЛ Ø 150
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 150
массажер медицинский




Назначение и использование:
Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 150 мм стимулирует нервные окончания, повышает температуру, улучшает кровоснабжение, способствует лучшему общению с окружающим организмом. **Пользователь:** массаж рефлексогенных зон. **Рекомендации:** после приема пищи и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение дисплазий, спина и шеи и различных мышечных травм, спондилит артрозофимозов, при обострении опорно-двигательного аппарата. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость любого из компонентов изделия, заболевания кожи, гнойники, остеомиелиты и любые другие заболевания. **Внимание!** Не допускать попадания влаги, масла, крема на изделие. **Упаковка:** полипропиленовый пакет, материал: полипропилен. **Применимо:** в качестве средства профилактики простуды, дезинфекции, устранения неприятных запахов, устранения запаха пота и запаха из обуви. **Свойства:** дезинфицирующего средства (АНУ, ЗНУ). **При использовании массажа:** изделие хранить в закрытом состоянии, допускать применение изделия под прямой солнечный свет и хранение с повышенной влажностью и повышенной температурой. **Рекомендуемая температура:** 20°С. **Для удобства** использования изделия, выполненная с помощью технологии лазерной резки и дробления **информация:**
 - Пользователю необходимо избегать попадания влаги на изделие, так в детей рук.
 - Переносить в руки с помощью указательного пальца.
 - Не касаться во время использования с различной силой нажатия.
 - Для массажа стопы.
 - Кладь на ладонь, не трогать пальцы, но выпрямлять от пальцев к пяточке и наоборот.
 - Аккуратно захватить ступню, держать и отпустить.
 - При необходимости чистить изделие.
 - Изделие необходимо вымыть массажер по области жемчуга, перед и после. При этом использовать горячую воду и чистящее средство из аптеки.



Массажер медицинский "Алпина Пласт" по ТУ 9398-022-17707123-2015
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017-5355 от 09.02.2017г.
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи
Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ
 Размер D= 150 мм
 Цвет синий
Материал: полипропилен
Хранение: в упакованном виде при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 С в защищенном от прямых солнечных лучей, влаги и прочих неблагоприятных факторов месте.
Упаковка: выдана с бытового штанда. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:


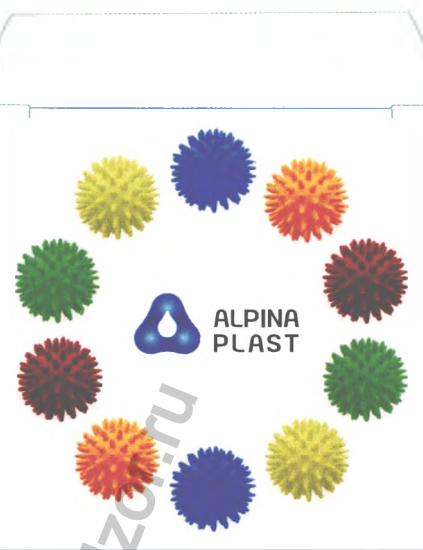


Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
- для развития мелкой моторики
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
- для профилактики и лечения плоскостопия
- при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
 читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/iglball

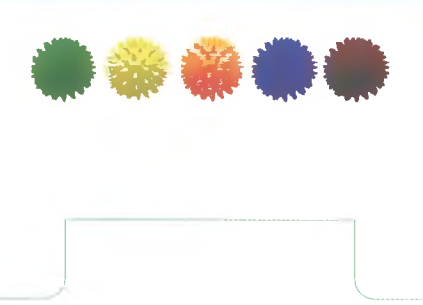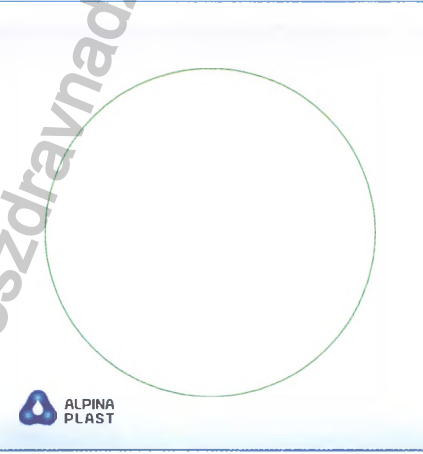

ИГЛБОЛ Ø 180
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 180
массажер медицинский

Инструкция по применению

Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 180 мм представляет собой шарик, выполненный из мягкого, упругого гипоаллергенного материала, обладающего свойствами массажного действия. Назначение: массаж профессионалов для профилактики вывихов и подвывихов, развития суставной подвижности, профилактики и лечения вальгусной стопы, а также мышечных травм и улучшения кровообращения при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушения целостности кожного покрова, острые воспалительные процессы, онкологические заболевания, беременность.

Внимание! Не допускать попадания воды на изделие и изделия, изготовленные из неводостойкого материала (деревянные).

Применение: изделие рекомендуется использовать в качестве массажного шарика для разработки суставов и мышц в области шеи, плечевого и локтевого суставов, кисти и запястья, голеностопного сустава, тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопа, стопы и пальцев стопы.

Рекомендуемые упражнения:


- Для улучшения кровообращения: изделие для массажа рекомендуется использовать на участках и участках конечностей.
- Помогает справиться с дискомфортом в шее, плече и в области запястья.
- Параллельно и вращательные движения конечностей.
- Перекатывать из стороны в сторону с различной скоростью.
- Для массажа стопы.
- Для массажа пальцев.
- Для улучшения кровообращения: изделие рекомендуется использовать на участках и участках конечностей.
- Для профилактики травм: изделие рекомендуется использовать на участках и участках конечностей.
- Для профилактики травм: изделие рекомендуется использовать на участках и участках конечностей.

При этом не рекомендуется использовать изделие на участках и участках конечностей.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9198-025-17707123-2015
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от 09.02.2017г
 Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ
 Размер: D= 180 мм
 Цвет синий
 Материал: пластик из поливинилхлоридный
 Хранение: в упакованном виде при температуре от -5 до +40°C в относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бегства и прочих внешних воздействий месте.
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и утилизация изделий, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:

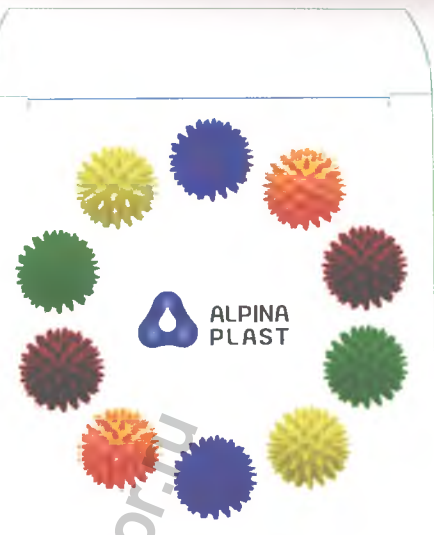

Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
 читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/igball



РЕФЛЕКСОБОЛ МИНИ
массажер медицинский



+0



РЕФЛЕКСОБОЛ МИНИ
массажер медицинский

Инструкция для пользователя:
Массажер медицинский РЕФЛЕКСОБОЛ МИНИ способствует снижению уровня стресса, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Назначение: массаж рефлексогенных зон способствует снятию усталости, развитию мелкой моторики, профилактике и лечению остеохондроза, головных и ревматических болей, улучшению кровообращения, при тахикардии, аритмии, вегетативного аппарата.

Противопоказания: нарушения целостности кожного покрова, острые заболевания кожи (фурункулы, ожоги, сыпь, дерматиты).

Внимание! Не допускается использование массажера с металлическими опореками (опорками, ручками).

Применение: массаж рефлексогенных зон выполняется при помощи массажера с помощью длительного протирания с обратной стороны ладони или тыльной стороны и раскатывания эллипсовидного предмета в МУ-287-131.


Цель использования: массаж рефлексогенных зон в домашних условиях для снятия стрессовых явлений, улучшения кровообращения, снятия усталости, профилактики и лечения остеохондроза и простудных заболеваний.

Рекомендуемая температура:
 Для улучшения кровообращения и снятия усталости рекомендуется использовать массажер в теплом или комнатном режиме.
 • Рекомендуется использовать массажер на чистых и сухих руках.
 • Рекомендуется использовать массажер в течение 10-15 минут.
 • Рекомендуется использовать массажер с максимальной скоростью.
 Для массажа шеи:
 • Сидеть на стуле, запрокинуть голову, поворачивать от головы к голове и наоборот.
 • Аккуратно захватывать пальцы и отжимать.
 Для массажа головы:
 • Сидеть на стуле, запрокинуть голову, поворачивать от головы к голове и наоборот.
 • Аккуратно захватывать пальцы и отжимать.
 • Для массажа лица:
 • Сидеть на стуле, запрокинуть голову, поворачивать от головы к голове и наоборот.
 • Аккуратно захватывать пальцы и отжимать.



Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по ТУ 9198-022-1770124-2015
 Регистрационное удостоверение № РЭН 2017/5355 от 09.02.2017г.
 Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления
 Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ
 Размер D- 50 мм
 Цвет синий
 Материал: пластик поликарбонатный
 Хранение: в упаковочном листе при температуре от -5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С в защищенном от прямых солнечных лучей, биопыли и вредных растительных мест.
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:

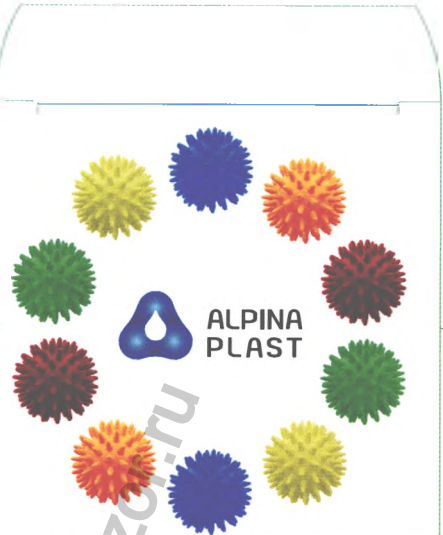

Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Производитель:
 ООО «Альпина Пласт», Россия,
 141600, Московская обл., Клинский район,
 Клин, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103
 тел. +7 (495) 787-93-66



Сделано в России

РЕФЛЕКСОБОЛ
массажер медицинский



РЕФЛЕКСОБОЛ
массажер медицинский

Назначение и применение:
 Массажер медицинский РЕФЛЕКСОБОЛ "Альпина Пласт" предназначен для оказания лечебного, массажного действия, оказания профилактических, реабилитационных мероприятий. Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мышечной активности, профилактика и лечение остеохондроза, спондилита в различных отделах шейного, грудного, пояснично-крестцового, тазобедренного, крестцово-копчикового отделов позвоночника. Противопоказания: беременность, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, заболевания органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфицирующие мероприятия (промыть изделие в мыльной воде, обработать антисептиком).
Условия хранения: изделие хранить в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С в относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.
Утилизация: изделие утилизируют как обычный бытовой отход.
Упаковка: изделие упаковано в индивидуальную упаковку (использованное изделие) подлежит утилизации в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-1770123-2015
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017-5355 от 09.02.2017г.
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи
 Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
 Размер D= 60 мм
 Цвет синий
 Материал: полипропиленовый пластик
 Условия: в сухом виде при температуре от +5 до +40°С в относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.
 Утилизация: изделие утилизируют как обычный бытовой отход.
 Упаковка: изделие упаковано в индивидуальную упаковку (использованное изделие) подлежит утилизации в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



Производитель:
 ООО "Альпина Пласт", Россия
 141600, Московская обл., Клинский р-н,
 г. Икля, Ленинградское ш., 89 км, стр. 103
 тел +7 (495) 787-93-66

www.alpina-plast.ru
 Сделано в России



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



УДОСТОВЕРЕНИЕ
РОСЗДРАВНАДЗОРА



НЕТОКСИЧНЫЙ



ГИПО-АЛЛЕРГЕННЫЙ

РЕФЛЕКСОБОЛ МАКСИ
массажер медицинский



0+



РЕФЛЕКСОБОЛ МАКСИ
массажер медицинский

Назначение: массаж.

Массажер медицинский РЕФЛЕКСОБОЛ МАКСИ предназначен для проведения массажа, снятия стресс, улучшения кровообращения, снятия усталости, общего оздоровления организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций), развитие мелкой моторики, профилактика и лечение артериальной гипертензии и развития мышечных спазмов, профилактика простудных заболеваний, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушения целостности кожных покровов, острые воспалительные заболевания, онкологические заболевания.

Внимание! Не допускается использование массажера с медицинскими изделиями (протезы, ранжеры).

Применение: изделие после первоначальной подготовки провести детскую гигиену с помощью дезинфицирующего средства (МУ 287-113).

При использовании массажера следует использовать в домашних условиях следующие профилактические меры под струей теплой воды с мылом с последующим сушением в проветриваемом помещении.

Рекомендуемые управления:

Для точечного кровообращения и мышечной релаксации использовать тыльную часть ладони и дельтовидную мышцу.

«Пальцами сжимать и разжимать» в шажок, по и другой руки.

«Перемещать в руке» в разном направлении.

«Параллельно на ладони» проводить в различных скоростях надавливания.

Движения вверх.

«Легко по шажку» по направлению от пальцев к ладони и шажком.

«Аккуратно захватить» сустав, двигаться и поглаживать.

«Движениями» массажиста.

«Регулярно и методично» выполнять массажер по области: живота, бедер, ног. При этом необходимо избегать области и участков с повышенной чувствительностью.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-17707123-2015
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от 09.02.2017г.
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня изготовления
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ
 Размер: D= 75 мм.
 Цвет: синий
 Материал: полипропиленовый
 Хранение: в упакованном виде при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 С и защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия: повторного потребительского свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Производитель:
 ООО «Альпина Пласт», Россия
 141600, Московская обл., Истринский р-н,
 г. Клин, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103
 тел. +7 (405) 787-93-66

www.alpina-plast.ru
 Сделано в России

ИГЛРОЛ МИНИ

массажер медицинский

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики.

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

За счёт более компактного размера ИГЛРОЛ МИНИ всегда удобно взять с собой.

массажеры медицинские «Альпина Пласт» №
ТУ 9399-022-1776123-2015,
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/0305 от
09.02.2017 г.,
Гарантийные срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
Самостоятельно или совместно с кафедрой.
На подлежит обязательной сертификации и декларированию в
РФ.
Размер: 75х40 мм,
цвет: желтый.
Материал: пластик поликарбонатный.
Упаковка: в упаковке 5 шт при температуре от -10 до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в
защитном от пыли, солнечного лучей, бензина и прочих
растворителей месте.
Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В упаковке
предоставлена информация о возможности возврата в заводской
упаковке, подлежащей ответственности со стороны
создателя медицинских изделий, применяемых в организации,
осуществляющей медицинскую деятельность.

Продавец:
ООО «Альпина Пласт», Россия,
141000, Московская обл., Климовский р-н,
п. Д.Ю., Индустриальное шоссе, 88 км стр. 103
тел.: +7 (4942) 21-43-94
www.alpinaplast.ru
Сделано в России
ИЗГОТОВИТЕЛЬ



Массажер
медицинский
ИГЛРОЛ



Массажер
медицинский
ИГЛБОЛ



Набор массажеров
медицинских
ИГЛРОЛ СЕТ



Массажер
медицинский
ИГЛРОЛ ФИТ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Инструкция по использованию:
Массажер медицинский ИГПРОЛ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики.

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью;
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпустить.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Массажеры медицинские «Альпина Пласт» по
ТУ 9398-025-17707123-2015.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от
09.02.2017 г.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.
Не подлежит обязательной сертификации и
декларированию в РФ.

Размер: 105*50 мм.

Цвет: синий.

Материал: полиэтиленполивинилхлоридный.

Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80%, при
25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и
прочих растворителей месте.

Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных
учреждениях образ временное хранение и вывоз изделия
по первому потребителю (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой
обращения медицинских отходов, принятой в организации,
осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:

ООО «Альпина Пласт», Россия
141600, Московская обл., Клинский р-н,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103
тел.: +7 (485) 131-50-42
www.alpina-plast.ru
Сделано в России
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050021032



4 607046 744330

ИГПРОЛ

массажер медицинский

Другие продукты



АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажер медицинский ИГБЛОЛ

Массажер медицинский ИГПРОЛ МИНИ

Массажер медицинский ИГПРОЛ ФИТ

Набор массажеров медицинских ИГПРОЛ СЕТ

ИГЛРОЛ ФИТ

массажер медицинский

Другие продукты

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ ФИТ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью;
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровоснабжение и уменьшается отложения жира.

Возможно использование в качестве утяжелителя во время тренировок.

Массажеры медицинские - Альпина Пласт - по
 TV 8398-022-17707123-2015.
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5355 от
 09.02.2017 г.
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
 Гарантийный срок хранения 2 года со даты изготовления.
 Не подлежит обязательной сертификации и
 декларированию в РФ.
 Размер: 105*50 мм.
 Цвет: красный.
 Материал: поликарбонат, полиметилметакрилат.
 Хранение: в упакованной форме при температуре от +5 до
 +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%
 при 25°С в защищенной от прямых солнечных лучей,
 сухая и прочая растительной среде.
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных
 учреждениях сбор, вывозное хранение и вывоз изделия,
 потерявшего потребительские свойства (использованное
 изделие), следует выполнять в соответствии со схемой
 обращения медицинских отходов, принятой в организации,
 осуществляющей медицинскую деятельность.

Производитель:
 ООО - Альпина Пласт - Россия
 141600, Московская обл., Клинский р-н,
 г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103
 тел. +7 (495) 989-03-66
 www.alpinaplast.ru
 Сделано в России
 ИЗОТОВИЧНО

Арт. 4050031062



4 607046 744347



АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Утяжелённый

Массажер медицинский ИГЛРОЛ МИНИ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ

Массажер медицинский ИГЛРОЛ

Набор массажеров медицинских ИГЛРОЛ СЕТ

ИГЛРОЛ СЕТ

набор массажеров медицинских в составе:
ИГЛРОЛ и ИГЛРОЛ МИНИ

Другие продукты



Массажер
медицинский
ИГЛРОЛ



Массажер
медицинский
ИГЛБОЛ



Массажер
медицинский
ИГЛРОЛ МИНИ



Массажер
медицинский
ИГЛРОЛ ФИТ

АНТИСТРЕСС

ТОНУС

РАЗВИТИЕ

При использовании массажера повышается мышечный тонус, уменьшается венозный застой и ускоряется капиллярный кровоток, улучшается функционирование периферической и центральной нервной системы.

Массажеры медицинские «Альпина Пласт»-80
ТУ 9398-002-17707123-2016
Регистрационный удостоверение № 93Н 20170555 от
09.05.2017 г.

Гарантийный срок изготовления 2 года со дня продажи.
Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.
Не подлежат обязательной сертификации и декларированию в
РФ.

Размер изделия ИГЛРОЛ – 105*50 мм / сантиметр,
ИГЛРОЛ МИНИ – 75*40 мм / сантиметр.

Материал: пластмасса, полипропилен, поликарбонат.
Хранение: в упаковке при температуре от +5 до
+40°С и относительной влажности воздуха не более 90% при
25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, ветра и
других неблагоприятных воздействий месте.

Указания: изделие с безвредными одами. В лечебных
указаниях: «Создает ощущение давления и тепла (используемое
показание), потогонительные свойства (используемое
изделие) следует выполнять в соответствии со схемой
общей медицинской сестры, принятой в организации
осуществляющей медицинскую деятельность».

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия
141600, Московская обл., Климовский р-н,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103
тел.: +7 (495) 781-93-66

«Альпина Пласт»
Сделано в России
ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 4050041032



4 607046 744354

АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Инструкция по использованию:

Массажер медицинский ИГЛРОЛ СЕТ стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов; местные заболевания кожи (гнойные, онкологические); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113). При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развития мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке;
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью;
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Поочередно прижимать стопами к полу или другой твердой поверхности;
- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для антицеллюлитного массажа:

- Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложения жира.

Набор объединяет преимущества ИГЛРОЛА и ИГЛРОЛА МИНИ для наибольшей эффективности.

ИГЛАН
ИГЛАН-СТИЛ

АЛЬПИНА
П Л А С Т

ИГЛБОЛ Ø 65
массажер медицинский

0+

65
ММ

Инструкция по использованию
Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 65 мм стимулирует нормальное кровообращение, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует лучшему усвоению пищи организмом.

Показания: массаж рефлексогенных зон (реабилитация после травм и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата).

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (грибковые, онкологические), высокая температура тела.

Внимание! Не допускается использование массажера с детьми младше 3 лет.

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом: два кратких прогрева на салфетке из бели или дезинфицирующим средством (МУЗ-287-113).

При использовании массажера индивидуально в домашних условиях, допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим высушиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

- Для улучшения кровообращения и расслабления чувствительных зон: массаж на ладони и тыльную сторону кисти.
- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.
- Перекатывать в руках с разной интенсивностью.
- Переключаться на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Жать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.
- Аккуратно зажимать стопами, держать и отпускать.

Для интенсивного вымывания массажа:

- Регулярно и интенсивно поглаживать массажер по области живота, спины, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и усиливается отхождение жидкости.

ИЗГОТОВЛЕНО:



АЛЬПИНА
П Л А С Т

Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия,
141600, Московская обл., Клинский р-н,
с.Крем, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103
тел. +7 (495) 787-93-66

www.alpina-plast.ru

Сделано в России.



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/igball



ИГЛБОЛ Ø 85
массажер медицинский



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

+0

85
ММ

ИГЛБОЛ Ø 85
массажер медицинский

Игрушка для всей семьи.

Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 85 мм служит здоровым окружающим, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению обмена веществ, улучшает питание тканей, улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует развитие мышечной моторики, профилактика и лечение плоскостопия, стимуляция и релаксация мышечной ткани, улучшение кровообращения, при мышечном болевом-давящем синдроме.

Игрушка предназначена для профилактики и лечения плоскостопия, мышечных болевых синдромов, мышечных спазмов, мышечной атрофии.

Внимание! Не допускать попадания игрушки в рот ребенка и животных, не допускать попадания игрушки в глаза, в уши, в нос.

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию игрушки для взрослых: протереть салфеткой, для детей: прокипятить в кипящей воде в течение 10 минут.

При использовании игрушки необходимо соблюдать следующие правила: использовать изделие в соответствии с инструкцией, избегать попадания игрушки в рот, в глаза, в уши, в нос, избегать попадания игрушки в глаза, в уши, в нос.

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать изделие в сочетании с другими видами массажа.

• Пользоваться изделием рекомендуется по одной-две руки.

• Переключать в руках с правой на левую.

• Переключать из тыльной поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

• Встать на стопы, на чистом коврике, поочередно от пальца к пальцу и наоборот.

• Аккуратно захватить ступню, держать и отпускать.

Для массажа ладоней:

• Встать на ладони, поочередно от пальца к пальцу и наоборот.

• Встать на ладони, поочередно от пальца к пальцу и наоборот.

• Встать на ладони, поочередно от пальца к пальцу и наоборот.



ИЗГОТВЛЕНО:



4 607046 741308

АЛЬПИНА
ПЛАСТ



Информация о продукции
Федеральный центр экспертизы по надзору в сфере

Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/iglbol

информационный
ИГЛБОЛ
массажер медицинский
Ø 120



АЛЬПИНА ПЛАСТ

ИГЛБОЛ Ø 120
массажер медицинский

Инструкция по использованию

Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 120 мм стимулирует нервные окончания, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.
Внимание! массаж рефлексогенных зон (разогревание после травмы и операций, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение дископатии, стимуляция и релаксация мышечных тканей, улучшение кровообращения), при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (гнояные, опоясывающие) высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с иными механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение валика: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой из бумажной или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ-287-113).

При использовании массажера на теле в домашних условиях, допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемый уход:
Для улучшения кровообращения и тонуса рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и тыльной стороне кисти.

• Поочередно свинуть и размотать по в одну, то в другую руку.

• Переключать в ручке фазой интенсивности.

• Переключать на разной высоте с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

• Альтерно левый, по правой ноге, по направлению от пальца к пятке и наоборот.

• Аккуратно захватить стопам, держать и отпустить.

Для антицеллюлитного массажа:

• Внутреннюю поверхность покатывать массажер по области живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 741308

АЛЬПИНА ПЛАСТ



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте

www.alpina-plast.ru/iglball

ИГЛБОЛ Ø 150
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 150
массажер медицинский

Инструкция по использованию

Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 150 мм используется по назначению: выполнять массаж, стимулировать кровообращение, способствовать восстановлению поврежденных тканей.

Назначение: массаж рефлексогенных зон при реабилитации после травм и операций, диагностика мышечного тонуса, профилактика и лечение отеков, стимуляция в реабилитации вывихов тазобедренного сустава, стимуляция кровотока при заболеваниях периферических артерий.

Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания суставов, заболевания кожи (гемангиомы, опрелости), высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с поврежденными элементами: выходящими штифтами, разрывами.

Применение: перед использованием необходимо провести дезинфекцию-стерилизацию прибора по инструкции производителя. Для этого или перед использованием в стационаре дезинфицирующее средство (МУ 28.0.11).

При использовании массажера необходимо вращать и давить на него, одновременно стимулируя рефлексы под ступней ног. Сильным сжатием ступней можно вызвать и простимулировать рефлексогенные зоны.

Для детей: для хронического заболевания ДЦП, поликистоза, спинального мышечного атрофия, а также для профилактики мышечной дистрофии.

• Перевернуть вилочку и установить ее в одной из дорожек (рис. 1).

• Переключить в нужное положение переключатель.

• Проверить, не застрял ли переключатель в дорожке (рис. 2).

Для массажера:

• Чистить по необходимости с помощью отполированной мягкой ткани и салфеток.

• Аккуратно снимать с ножки, держать и откладывать.

Для дезинфекции:

• Изготовлен из высококачественного пищевого пластика высшего класса. При этом не требуется стерилизации и кипячения отпаривания.

ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 174130 8



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/igball

ИГЛБОЛ Ø 180
массажер медицинский



ИГЛБОЛ Ø 180
массажер медицинский

Иструкция по использованию:
 Массажер медицинский ИГЛБОЛ Ø 180 мм способствует улучшению обмена веществ, помогает снять стресс, улучшает кровообращение, способствует улучшению общего самочувствия организма.
Назначение: массаж рефлексогенных зон (различных зон), травм и операций, рефлекторно-моторная, профилактика и лечение плоскостопия, стенокардия и ревматоидных заболеваний, улучшение кровообращения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (гнойные, гнойно-геморрагические, язвенные).

Назначение: Не допускается использование массажера в следующих случаях:
 - при наличии ран, трещин, ожогов;
 - при наличии воспалительных заболеваний, сопровождающихся повышением температуры тела;
 - при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся нарушением ритма сердца (МУ 2873.13).



При использовании массажера в целях профилактики заболеваний рекомендуется использовать массажер в течение 10-15 минут 1-2 раза в день.
Рекомендуемые упражнения:
 Для улучшения кровообращения в области рук: поместить чувствительности кисти на ладонь и ладонь второй кисти.
 - Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.
 - Переключать в руках с различной интенсивностью.
 - Переключать на тыльной поверхности с различной силой нажима.
 Для массажа стоп:
 - Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.
 - Аккуратно сжимать стопу, держать и отпускать.
 Для массажа живота:
 - Регулярно и интенсивно покатывать массажер по областям живота, бедер, ягодиц. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



ИЗГОТОВЛЕНО:



Массажеры медицинские "Альпина Пласт" по ТУ 5198-022-1770123-2015
 Регистрационное удостоверение № РИЗ 2017.5355 от 09.02.2017г.
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
 Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
 Размер: D= 180 мм
 Цвет синий
 Материал: пластик поливинилхлоридный.
 Хранение: в упаковочной коробке при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 С в защищенном от прямых солнечных лучей, влаги и против растительной плесени.
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации осуществляющей медицинскую деятельность.

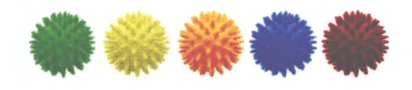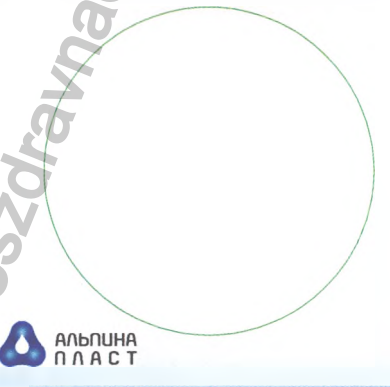

Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Новые пальчиковые игры для детей
читайте на нашем сайте
www.alpina-plast.ru/igball

РЕФЛЕКСБОЛ МИНИ
массажер медицинский



РЕФЛЕКСБОЛ МИНИ
массажер медицинский

Инструкция по применению

Массажер медицинский РЕФЛЕКСБОЛ МИНИ предназначен для снятия стресса, улучшения кровообращения, способности улучшить обмен кальция в костях организма.

Показания: массаж рефлексогенных зон для снятия стресса, улучшения кровообращения, снятия усталости, повышения иммунитета, профилактики и лечения плоскостопия, кистозной и релаксации мышечных тканей, улучшения кровообращения, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов, местные заболевания кожи (опухоль, онкологическое), высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с подвижными металлическими поврежденными (трещина, разрыв).

Применение изделия перед применением необходимо провести дезинфекцию способом двукратного протирания салфеткой или при помощи смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 247.113).

При использовании массажера изделие можно использовать в домашних условиях, допускается промышленное изделие под струей теплой воды в месте последующего ополаскивания и просушивания.

Рекомендуемые упражнения:

- Для улучшения кровообращения в мизинце рук: ладонями чувствительности лежат на пальцах и делают массаж кончиками.
- Полностью сжать и разжать до второй, то в другой руке.
- Перекачивать в руках с разной интенсивностью.
- Перекачивать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа ступ:

- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот.
- Аккуратно захватить ступню, держать и отпустить.
- Для антицеллюлитного массажа:
- Регулярно и интенсивно растекать массажер по областям живота, бедер, ногам. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 741308 >



АЛЬПИНА ПЛАСТ



Производитель:
ООО «Альпина Пласт», Россия,
141600, Московская обл., Клинский р-н,
г. Кли, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103
тел. +7 (495) 787-93-66

www.alpina-plast.ru
Сделано в России.

Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



РЕФЛЕКСОБОЛ
массажер медицинский



+0

АЛЬПИНА
П Л А С Т

РЕФЛЕКСОБОЛ
массажер медицинский

Инструкция по использованию

Массажер медицинский РЕФ.ТЕКУ.ОБС.1 способствует нормализации состояния при стрессе, учащает кровообращение, способствует снижению общего уровня напряжения.

Показания: массаж рефлексогенных зон (ребра/бедра после травмы и операций); разрывы мышечных волокон; профилактика и лечение варикоза; атрофия и расслабление мышечной ткани; спондило-кровообращение при межпозвоночных грыжах и остеохондрозе аппарата.

Противопоказания: острое состояние инфаркта миокарда, инсульта, гипертонической болезни (повышенное артериальное давление); высокая температура.

Внимание! Не допускается использование массажера с видимыми механическими повреждениями (трещины, разрывы).

Применение изделия: перед применением необходимо провести дезинфекцию способом длительного протирания салфеткой из бели или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113).

При использовании массажера индивидуально в домашних условиях допускается промывание изделия под струей теплой воды с мылом с последующим ополаскиванием и просушиванием.

Рекомендуемые упражнения:

Для улучшения кровообращения в мышцах рук, повышения чувствительности кожи на ладонях и развитии мелкой моторики:

- Поочередно сжимать и разжимать то в одной, то в другой руке.
- Перекатывать в руках эластичный материал;
- Перекатывать на твердой поверхности с различной силой нажима.

Для массажа стоп:

- Катать то левой, то правой ногой, по направлению от пальцев к пятке и наоборот;
- Аккуратно зажимать ступню, держать и отпускать.

Для улучшения кровообращения:

- Регулярно и интенсивно разминать массажер по областям живота, бедер, ищадки. При этом улучшается кровообращение и уменьшается отложение жира.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-1770123-2015
 Регистрационный номер в Росздравнадзоре № РИИ 2017-5355 от 09.02.2017г.
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
 Гарантийный срок хранения изделия с даты изготовления
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ
 Размер: D= 60 мм.
 Цвет: синий.
 Материал: полипропиленовый пластик.
 Хранение: в упаковочной форме при температуре от -5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, безпыля и прохладном месте.
 Указания: вместе с бытовыми отходами. В любом случае рекомендуется сбор, временное хранение и вывоз изделия (потребители) по правилам экологии (использовать изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



4 607046 174130 8

АЛЬПИНА
П Л А С Т

Промышленная
 ООО «Альпина Пласт» Россия
 141600, Московская обл. Клинский р.н.
 г.Клин, Ленинградское ш., 88 км стр. 103
 тел. +7 (495) 767-03-66

Сделано в России



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



УДОСТОВЕРЕНИЕ
РОСЗДРАВНАДЗОРА



НЕТОКСИЧНЫЙ



ГИПО-
АЛЛЕРГЕННЫЙ

РЕФЛЕКСБОЛ МАКСИ
массажер медицинский



РЕФЛЕКСБОЛ МАКСИ
массажер медицинский

Изготовлено по заказу ООО «Альпина Пласт»

Массажер медицинский РЕФЛЕКСБОЛ МАКСИ способствует нормализации сна, снижению стресса, улучшает кровообращение, способствует снижению общего самочувствия при артрите.

Показания: массаж рефлексогенных зон, травматические повреждения и операции, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, улучшение кровообращения венозной системы нижних конечностей, улучшение кровообращения при заболеваниях периферической нервной системы (парезы, параличи), при заболеваниях суставов (артриты, артрозы), при заболеваниях позвоночника (остеохондроз, грыжи, протрузии, спондилиты).

Противопоказания: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях периферической нервной системы, при заболеваниях периферической нервной системы, при заболеваниях периферической нервной системы.

Применение: массаж рефлексогенных зон, травматические повреждения и операции, развитие мелкой моторики, профилактика и лечение плоскостопия, улучшение кровообращения венозной системы нижних конечностей, улучшение кровообращения при заболеваниях периферической нервной системы (парезы, параличи), при заболеваниях суставов (артриты, артрозы), при заболеваниях позвоночника (остеохондроз, грыжи, протрузии, спондилиты).

При использовании массажера индивидуально и динамично, учитывая допустимый предел нагрузки на суставы. Вращать шарики и массажер по часовой стрелке и в обратном направлении.

Рекомендуемые упражнения:

Для укрепления кровообращения в кистях рук, массажерами выполняются движения по часовой и в обратную сторону.

Для укрепления мышц кисти:

- Почередно сжимать и разжимать по 1 шарик, по 1 в другой руке.
- Перекатывать шарик с ладони на тыльную сторону.
- Перекатывать шарик по тыльной стороне с разницей в 1 см.
- Для укрепления мышц кисти:
- Массажером выполнять массаж.
- Массажером выполнять массаж.
- Массажером выполнять массаж.

Для укрепления мышц кисти:

- Почередно сжимать и разжимать по 1 шарик, по 1 в другой руке.
- Перекатывать шарик с ладони на тыльную сторону.
- Перекатывать шарик по тыльной стороне с разницей в 1 см.
- Для укрепления мышц кисти:
- Массажером выполнять массаж.
- Массажером выполнять массаж.
- Массажером выполнять массаж.



Массажер медицинский "Альпина Пласт" по ТУ 9398-022-17707123-2015
 Регистрационное удостоверение № ГИИ 2017-5355 от 09.02.2017г.
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.
 Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.
 Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
 Размер: D= 75 мм.
 Цвет: синий.
 Материал: пластик поликарбонатный.
 Хранение: в упакованном виде при температуре от -5 до -40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С и защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.
 Утилизация: утилизируются бытовыми отходами. В лечебных учреждениях сбор, хранение, хранение и утилизация, потерявшего потребительские свойства (использованное изделие), следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ИЗГОТОВЛЕНО:



Производитель:
 ООО «Альпина Пласт», Россия,
 141600, Московская обл., Клинский р-н,
 г. Клин, Ленинградское ш., 88 км, стр. 103
 тел. +7 (495) 787-93-66

www.alpina-plast.ru
 Сделано в России.



Универсальный тренажер для всей семьи:

- антицеллюлитный массаж
- детский массаж
- антистресс
- массаж рефлексогенных зон:
 - для развития мелкой моторики
 - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
 - для профилактики и лечения плоскостопия
 - при реабилитации после инсульта



Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

И.Н. Игутов
Генеральный директор (ов)
ООО «Альпина Пласт»
И.Н. Игутов

