

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Медсервис Плюс»
Сатин Н.Н.



**БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019**

Инструкция по применению

№ 1 ИПП

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.roszdravnadzor.ru

г.Великий Новгород
2019 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция по применению (далее ИПП) содержит техническое описание бахил медицинских одноразовых по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019 (далее бахилы); правила и указания для их правильного применения и другие сведения, которые необходимо знать пользователю.

1.2 Настоящая ИПП распространяется на все виды и типоразмеры (артикулы) бахил, изготовленных из полиэтилена, по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Бахилы предназначены для применения в качестве разовых защитных чехлов на обувь пациентов, посетителей, медицинского персонала, с целью предотвращения загрязнения, распространения возбудителей инфекционных заболеваний.

2.2 Область применения: применяются в ЛПУ и медучреждениях в качестве разовых защитных чехлов на обувь пациентов, посетителей, медперсонала, с целью предотвращения загрязнения, распространения возбудителей инфекционных заболеваний.

2.3 Бахилы исправны в процессе эксплуатации при воздействии температуры от +10⁰ С до +35⁰ С и относительной влажности 80% при 25⁰С согласно ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Для изготовления бахил используется:

- Пленка полиэтиленовая, полотно, марки «Нп», 1 сорт, по ГОСТ 10354;
- Краситель –марки **СКГП-501 ПО5569**, цвет синий;
- Краситель –марки **СКГП-401 ПО4363**, цвет зеленый;
- Краситель –марки **СКГП-201 ПО21102**, цвет оранжевый;
- Краситель –марки **СКГП-601 ПО65501**, цвет фиолетовый;
- Краситель –марки **СКГП-101 ПО11103**, цвет красный;
- Краситель –марки **СКГП-301 ПО31102**, цвет желтый;
- Краситель –марки **Суперконцентрат KRITILEN BLACK 340**, цвет черный;
- Краситель –марки **Суперконцентрат WHITE 160**, цвет белый;
- Резинка: нить латексная, марки 42 NW 40 RX TALCUM.

Бахилы представляют собой чехлы, которые надеваются на уличную обувь. Бахилы фиксируются на ноге с помощью резинки.

Бахилы одноразовые. Бахилы выпускаются в нестерильном виде.

Основные технические характеристики бахил представлены в таблице № 1

Таблица 1. Основные технические характеристики бахил

Бахилы из полиэтилена:

№ п/п	Артикул изделия	Тип изделия	Толщина изделия Т, мкм (допуск ± 20%)	Ко-во резинок	Длина основы Д, мм (допуск ± 15 мм)	Высота основы В, мм (допуск ± 15 мм)	Доп. подошва	Высота доп. подошвы В ₁ , мм (допуск ± 10 мм)	Цвет основы	Цвет дополнительной подошвы
1	МСП14/1	ЛАЙТ	14	1	400	100	-	-	синий	-
2	МСП14/2	ЛАЙТ+	14	1	400	120	-	-	синий	-
3	МСП17/3	ЭКОНОМ ЛАЙТ	17	1	400	100	-	-	синий	-
4	МСП17/4	ЭКОНОМ	17	1	400	120	-	-	синий	-
5	МСП17/5	ЭКОНОМ+	17	1	400	140	-	-	синий	-
6	МСП20/6	СТАНДАРТ ЛАЙТ Н	20	1	400	100	-	-	синий	-
7	МСП20/7	СТАНДАРТ ЛАЙТ	20	1	400	120	-	-	синий	-
8	МСП20/8	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	синий	-
9	МСП20/9	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	зеленый	-
10	МСП20/10	СТАНДАРТ 1У	20	1	300	120	-	-	зеленый	-
11	МСП20/11	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	оранжевый	-
12	МСП20/12	СТАНДАРТ 1У	20	1	300	120	-	-	оранжевый	-
13	МСП20/13	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	фиолетовый	-
14	МСП20/14	СТАНДАРТ 1У	20	1	300	120	-	-	фиолетовый	-
15	МСП20/15	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	красный	-
16	МСП20/16	СТАНДАРТ 1У	20	1	300	120	-	-	красный	-
17	МСП20/17	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	желтый	-
18	МСП20/18	СТАНДАРТ 1У	20	1	300	120	-	-	желтый	-
19	МСП20/19	СТАНДАРТ 1	20	1	400	140	-	-	черный	-
20	МСП20/20	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	синий	-
21	МСП20/21	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	зеленый	-
22	МСП20/22	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	оранжевый	-
23	МСП20/23	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	фиолетовый	-
24	МСП20/24	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	красный	-
25	МСП20/25	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	желтый	-
26	МСП20/26	СТАНДАРТ 2	20	2	400	140	-	-	черный	-
27	МСП25/27	СТАНДАРТ 2+	25	2	400	140	-	-	синий	-
28	МСП30/28	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	синий	-
29	МСП30/29	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	зеленый	-
30	МСП30/30	ЭКСТРА У	30	2	300	120	-	-	зеленый	-
31	МСП30/31	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	оранжевый	-
32	МСП30/32	ЭКСТРА У	30	2	300	120	-	-	оранжевый	-
33	МСП30/33	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	фиолетовый	-
34	МСП30/34	ЭКСТРА У	30	2	300	120	-	-	фиолетовый	-
35	МСП30/35	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	красный	-
36	МСП30/36	ЭКСТРА У	30	2	300	120	-	-	красный	-
37	МСП30/37	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	желтый	-
38	МСП30/38	ЭКСТРА У	30	2	300	120	-	-	желтый	-

39	МСП30/39	ЭКСТРА	30	2	400	140	-	-	черный	-
40	МСП40/40	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	синий	-
41	МСП40/41	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	зеленый	-
42	МСП40/42	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	оранжевый	-
43	МСП40/43	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	фиолетовый	-
44	МСП40/44	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	красный	-
45	МСП40/45	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	желтый	-
46	МСП40/46	ЭКСТРА+	40	2	400	140	-	-	черный	-
47	МСП30/47	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	синий
48	МСП30/48	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	зеленый
49	МСП30/49	СУПЕР30 У	30	1	300	120	есть	9	белый	зеленый
50	МСП30/50	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	оранжевый
51	МСП30/51	СУПЕР30 У	30	1	300	120	есть	9	белый	оранжевый
52	МСП30/52	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
53	МСП30/53	СУПЕР30 У	30	1	300	120	есть	9	белый	фиолетовый
54	МСП30/54	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	красный
55	МСП30/55	СУПЕР30 У	30	1	300	120	есть	9	белый	красный
56	МСП30/56	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	желтый
57	МСП30/57	СУПЕР30 У	30	1	300	120	есть	9	белый	желтый
58	МСП30/58	СУПЕР30	30	1	400	140	есть	9	белый	черный
59	МСП40/59	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	синий
60	МСП40/60	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	зеленый
61	МСП40/61	СУПЕР40 У	40	1	300	120	есть	9	белый	зеленый
62	МСП40/62	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	оранжевый
63	МСП40/63	СУПЕР40 У	40	1	300	120	есть	9	белый	оранжевый
64	МСП40/64	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
65	МСП40/65	СУПЕР40 У	40	1	300	120	есть	9	белый	фиолетовый
66	МСП40/66	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	красный
67	МСП40/67	СУПЕР40 У	40	1	300	120	есть	9	белый	красный
68	МСП40/68	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	желтый
69	МСП40/69	СУПЕР40 У	40	1	300	120	есть	9	белый	желтый
70	МСП40/70	СУПЕР40	40	1	400	140	есть	9	белый	черный
71	МСП50/71	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	синий
72	МСП50/72	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	зеленый
73	МСП50/73	СУПЕР50 У	50	2	300	120	есть	9	белый	зеленый
74	МСП50/74	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	оранжевый
75	МСП50/75	СУПЕР50 У	50	2	300	120	есть	9	белый	оранжевый
76	МСП50/76	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
77	МСП50/77	СУПЕР50 У	50	2	300	120	есть	9	белый	фиолетовый
78	МСП50/78	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	красный
79	МСП50/79	СУПЕР50 У	50	2	300	120	есть	9	белый	красный
80	МСП50/80	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	желтый
81	МСП50/81	СУПЕР50 У	50	2	300	120	есть	9	белый	желтый
82	МСП50/82	СУПЕР50	50	2	400	140	есть	9	белый	черный
83	МСП60/83	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	синий
84	МСП60/84	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	зеленый
85	МСП60/85	СУПЕР60 У	60	2	300	120	есть	9	белый	зеленый

86	МСП60/86	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	оранжевый
87	МСП60/87	СУПЕР60 У	60	2	300	120	есть	9	белый	оранжевый
88	МСП60/88	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
89	МСП60/89	СУПЕР60 У	60	2	300	120	есть	9	белый	фиолетовый
90	МСП60/90	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	красный
91	МСП60/91	СУПЕР60 У	60	2	300	120	есть	9	белый	красный
92	МСП60/92	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	желтый
93	МСП60/93	СУПЕР60 У	60	2	300	120	есть	9	белый	желтый
94	МСП60/94	СУПЕР60	60	2	400	140	есть	9	белый	черный
95	МСП70/95	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	синий
96	МСП70/96	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	зеленый
97	МСП70/97	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	оранжевый
98	МСП70/98	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
99	МСП70/99	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	красный
100	МСП70/100	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	желтый
101	МСП70/101	СУПЕР70	70	2	400	140	есть	9	белый	черный
102	МСП80/102	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	синий
103	МСП80/103	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	зеленый
104	МСП80/104	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	оранжевый
105	МСП80/105	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
106	МСП80/106	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	красный
107	МСП80/107	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	желтый
108	МСП80/108	СУПЕР80	80	2	400	140	есть	9	белый	черный
109	МСП100/109	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	синий
110	МСП100/110	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	зеленый
111	МСП100/111	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	оранжевый
112	МСП100/112	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	фиолетовый
113	МСП100/113	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	красный
114	МСП100/114	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	желтый
115	МСП100/115	СУПЕР100	100	2	400	140	есть	9	белый	черный

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Бахилы относятся к одноразовым изделиям, представляют собой чехлы, которые надеваются на личную обувь. Бахилы фиксируются на ноге с помощью резинок.

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бахилы применяются в ЛПУ и медучреждениях в качестве разовых защитных чехлов на обувь пациентов, посетителей, медперсонала, с целью предотвращения загрязнения, распространения возбудителей инфекционных заболеваний.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бахилы не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Внимание! Предупреждайте пользователей о том, что необходимо соблюдать осторожность при ходьбе в бахилах.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Бахилы не имеют побочных действий.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1. Эксплуатационные ограничения

- не подлежат использованию бахилы при наличии механических повреждений (порезы, просечки, засечки, пробоины и любые отверстия, пропускающие воду);
- не допускается использовать изделие вторично;
- беречь от соприкосновения с острыми и режущими предметами.

8.2. Подготовка изделия к использованию

- извлечь бахилы из упаковки, расправить;
- визуально проверить целостность бахил.

8.3. Использование изделия

Надеть бахилы на ногу (обувь), чтобы они полностью покрывали стопы, после использования утилизировать.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бахилы являются одноразовыми изделиями и технического обслуживания не требуют.

10. ХРАНЕНИЕ

Бахилы хранят в закрытых сухих помещениях, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды от +5° С до +40° С.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1. Бахилы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

11.2. Условия транспортирования – группа 5 по ГОСТ 15150.

11.3. Транспортные упаковки с бахилами хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, использованные по назначению бахилы относятся к отходам класса А.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий ТУ 32.50.50-003-70834095-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

12.3 По истечении гарантийного срока хранения перед применением бахилы проверяются на соответствие требованиям ТУ 32.50.50-003-70834095-2019.

12.4 Все дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, влекущие нарушение характеристик продукции при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования, устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

12.5 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений бахил при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими и механическими воздействиями, не оговоренными в настоящей ИПП;
- доработки бахил потребителем (изменений конструкции).

13.6 Качество применяемых материалов подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами или декларациями соответствия, паспортами, формулярами).

13. ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Медсервис Плюс»

Юридический адрес: 173007, Россия, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Троицкая, д.43, корп.4

Тел. (8162) 502-700

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 4 (сильо) листа (ов)

Генеральный директор ООО «Медсервис
Плюс»

Н.Н.Сатин



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медсервис Плюс»

Сатин Н.Н.



05.04.2019г.

**БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019**

Инструкция по применению

№ 2 ИПП

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору

www.goszdramnadzor.ru

г.Великий Новгород
2019 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция по применению (далее ИПП) содержит техническое описание бахил медицинских одноразовых по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019 (далее бахилы); правила и указания для их правильного применения и другие сведения, которые необходимо знать пользователю.

1.2 Настоящая ИПП распространяется на все виды и типоразмеры (артикулы) бахил, изготовленных из полотна нетканого полипропиленового (спанбонда), по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Бахилы предназначены для применения в качестве разовых защитных чехлов на обувь пациентов, посетителей, медицинского персонала, с целью предотвращения загрязнения, распространения возбудителей инфекционных заболеваний.

2.2 Область применения: применяются в ЛПУ и медучреждениях в качестве разовых защитных чехлов на обувь пациентов, посетителей, медперсонала, с целью предотвращения загрязнения, распространения возбудителей инфекционных заболеваний.

2.3 Бахилы исправны в процессе эксплуатации при воздействии температуры от +10⁰ С до +35⁰ С и относительной влажности 80% при 25⁰С согласно ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Для изготовления бахил используется:

- Полотно нетканое полипропиленовое для изготовления изделий медицинского назначения. Тип СС (спанбонд),
- Краситель – марки СКГП-501 ПО5569, цвет синий,
- Резинка: нить латексная, марки 42 NW 40 RX TALCUM

Бахилы представляют собой чехлы, которые надеваются на уличную обувь. Бахилы фиксируются на ноге с помощью резинок.

Бахилы одноразовые. Бахилы выпускаются в нестерильном виде.

Основные технические характеристики бахил представлены в таблице № 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики бахил

Бахилы из ИПП (спанбонд):

№ п/п	Артикул изделия	Тип изделия	Поверхностная плотность изделия П, г/м ² (допуск ± 20%)	Ко-во резинок	Длина основы Д, мм (допуск ± 15 мм)	Высота основы В, мм (допуск ± 15 мм)	Размерная линейка	Цвет основы
1	МСП10С/116	ЭКОНОМ(С)	10	1	300	120	S	белый
2	МСП10С/117	ЭКОНОМ(С)	10	1	340	120	M	белый
3	МСП10С/118	ЭКОНОМ(С)	10	1	370	120	L	белый
4	МСП10С/119	ЭКОНОМ(С)	10	1	400	140	XL	белый
5	МСП10С/120	ЭКОНОМ(С)	10	1	300	120	S	голубой
6	МСП10С/121	ЭКОНОМ(С)	10	1	340	120	M	голубой
7	МСП10С/122	ЭКОНОМ(С)	10	1	370	120	L	голубой
8	МСП10С/123	ЭКОНОМ(С)	10	1	400	140	XL	голубой

9	МСП20С/124	СТАНДАРТ(С)	20	1	300	120	S	белый
10	МСП20С/125	СТАНДАРТ(С)	20	1	340	120	M	белый
11	МСП20С/126	СТАНДАРТ(С)	20	1	370	120	L	белый
12	МСП20С/127	СТАНДАРТ(С)	20	1	400	140	XL	белый
13	МСП20С/128	СТАНДАРТ(С)	20	1	300	120	S	голубой
14	МСП20С/129	СТАНДАРТ(С)	20	1	340	120	M	голубой
15	МСП20С/130	СТАНДАРТ(С)	20	1	370	120	L	голубой
16	МСП20С/131	СТАНДАРТ(С)	20	1	400	140	XL	голубой
17	МСП25С/132	СТАНДАРТ+(С)	25	1	300	120	S	белый
18	МСП25С/133	СТАНДАРТ+(С)	25	1	340	120	M	белый
19	МСП25С/134	СТАНДАРТ+(С)	25	1	370	120	L	белый
20	МСП25С/135	СТАНДАРТ+(С)	25	1	400	140	XL	белый
21	МСП25С/136	СТАНДАРТ+(С)	25	1	300	120	S	голубой
22	МСП25С/137	СТАНДАРТ+(С)	25	1	340	120	M	голубой
23	МСП25С/138	СТАНДАРТ+(С)	25	1	370	120	L	голубой
24	МСП25С/139	СТАНДАРТ+(С)	25	1	400	140	XL	голубой
25	МСП42С/140	ЭКСТРА(С)	42	1	300	120	S	белый
26	МСП42С/141	ЭКСТРА(С)	42	1	340	120	M	белый
27	МСП42С/142	ЭКСТРА(С)	42	1	370	120	L	белый
28	МСП42С/143	ЭКСТРА(С)	42	1	400	140	XL	белый
29	МСП42С/144	ЭКСТРА(С)	42	1	300	120	S	голубой
30	МСП42С/145	ЭКСТРА(С)	42	1	340	120	M	голубой
31	МСП42С/146	ЭКСТРА(С)	42	1	370	120	L	голубой
32	МСП42С/147	ЭКСТРА(С)	42	1	400	140	XL	голубой

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Бахилы относятся к одноразовым изделиям, представляют собой чехлы, которые надеваются на уличную обувь. Бахилы фиксируются на ноге с помощью резинки.

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бахилы применяются в ЛПУ и медучреждениях в качестве разовых защитных чехлов на обувь пациентов, посетителей, медперсонала, с целью предотвращения загрязнения, распространения возбудителей инфекционных заболеваний.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бахилы не имеют медицинских противопоказаний к применению.

Внимание! Предупреждайте пользователей о том, что необходимо соблюдать осторожность при ходьбе в бахилах.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Бахилы не имеют побочных действий.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1. Эксплуатационные ограничения

- не подлежат использованию бахилы при наличии механических повреждений (порезы, просечки, засечки, пробоины);
- не допускается использовать изделие вторично;

- беречь от соприкосновения с острыми и режущими предметами.

8.2. Подготовка изделия к использованию

- извлечь бахилы из упаковки, расправить;
- визуально проверить целостность бахил.

8.3. Использование изделия

Надеть бахилы на ногу (обувь), чтобы они полностью покрывали стопы, после использования утилизировать.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бахилы являются одноразовыми изделиями и технического обслуживания не требуют.

10. ХРАНЕНИЕ

Бахилы хранят в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды от +5° С до +40° С.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1. Бахилы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

11.2. Условия транспортирования – группа 5 по ГОСТ 15150.

11.3. Транспортные упаковки с бахилами хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, использованные по назначению бахилы относятся к отходам класса А.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий ТУ 32.50.50-003-70834095-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

13.3 По истечении гарантийного срока хранения перед применением бахилы проверяются на соответствие требованиям ТУ 32.50.50-003-70834095-2019.

13.4 Все дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, влекущие нарушение характеристик продукции при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования, устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

13.5 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений бахил при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими и механическими воздействиями, не оговоренными в настоящей ИПП;
- доработки бахил потребителем (изменений конструкции).

13.6 Качество применяемых материалов подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами или декларациями соответствия, паспортами, формулярами).

14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Медсервис Плюс»

Юридический адрес: 173007, Россия, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Троицкая, д.43, корп.4

Тел. (8162) 502-700

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramadzor.ru

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листа (ов)

Генеральный директор ООО «Медсервис Плюс»



Н.Н.Сатин