

**Руководство по эксплуатации  
медицинского изделия Пессарии аку  
по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018**

Медицинское изделие Пессарии акушерские р (далее – «пессарии» или «ПАРС») предназначе с истмико-цервикальной недостаточностью (И Вид МИ- 300810 ОКПД-2 - 32.50.13.15

Область применения – акушерство, ПАРС пр специализистом.

Выпускаются ПАРС 3-х размеров:

- Пессарий акушерский разгружающий силикон
- Пессарий акушерский разгружающий силикон
- Пессарий акушерский разгружающий силикон

**Стерильность.**

ПАРС поставляются стерильными и готовы Использовать пессарии нужно непосредствен

Принцип действия пессария акушерского разгру матки вследствие снижения давления плодного яй

**Показания к применению.**

- функциональная и органическая истмико-цервик
- профилактика истмико-цервикальной недостаточ
- профилактика несостоятельности шва при хирург


Пессарии акушерские разгружающие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:

Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №1

Образец для государственной регистрации

Дата изготовления 2018-01 Годен до: 2021-01

Производитель:  
ООО «Медицинское предприятие «Симург», РФ, 199178 г. Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., д.29, лит.З, офис А 417 тел. +7(812)3329170 WWW.SIMURG-MP.COM

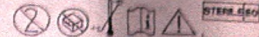

Не использовать повторно.  
Не применять при повреждении упаковки  
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри  
Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



steriCURL ISO 11607 19cm/200m REF 230110 LOT 3027612 201707 EO processed

Пессарии акушерские разгружающие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:  
Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №1  
Образец для государственной регистрации  
Дата изготовления 2018-01 Годен до: 2021-01

Производитель:  
ООО «Медицинское предприятие «Симург», РФ, 199178 г. Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., д.29, лит.З, офис А 417 тел. +7(812)3329170 WWW.SIMURG-MP.COM



Не использовать повторно.  
Не применять при повреждении упаковки  
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри  
Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



*Формо Пессарии акушерские разгружающие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018: Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №1*



*Вед. директор  
Темнов С.И.*

**Руководство по эксплуатации  
медицинского изделия Пессарии акушер  
по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018**

Медицинское изделие Пессарии акушерские разгру  
(далее – «пессарии» или «ПАРС») предназначены д  
с истмико-первичной недостаточностью (ИПН)  
Вид МИ - 300810 ОКПД-2 - 32.50.13.190

Область применения – акушерство. ПАРС приме  
специалистам

Выпускаются ПАРС 3-х размеров:

- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый
- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый
- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый

**Стерильность.**

ПАРС поставляются стерильными и готовыми к  
Использовать пессарии нужно непосредственно по

Принцип действия пессария акушерского разгружающ


**Пессарии акушерские разгружающие силиконовые  
по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:**  
Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №2  
Образец для государственной регистрации  
Дата изготовления 2018-01 Годен до: 2021-01

Производитель:  
ООО «Медицинское предприятие  
«Симург», РФ, 199178 г. Санкт-  
Петербург, линия 18-я В.О., д.29,  
лит.3, офис А 417

тел.+7(812)3329170  
WWW.SIMURG-MP.COM

Не использовать повторно.  
Не применять при повреждении упаковки  
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной  
документации

15cm/200m  
LOT 3027812 201707 EO processed 灭菌处理后指示标记为黄色  
gelb-yellow-giallo-amarillo-jaune  ISO 11607 15cm/200m  
REF 230110 LOT 3027812 201707

**Пессарии акушерские разгружающие силиконовые  
по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:**  
Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №2  
Образец для государственной регистрации  
Дата изготовления 2018-01 Годен до: 2021-01

Производитель:  
ООО «Медицинское предприятие  
«Симург», РФ, 199178 г. Санкт-  
Петербург, линия 18-я В.О., д.29,  
лит.3, офис А 417  
тел.+7(812)3329170  
WWW.SIMURG-MP.COM

Не использовать повторно.  
Не применять при повреждении упаковки  
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри  
Осторожно! Обратитесь к сопроводительной  
документации



*Фото. Пессарии акушерские разгружающ  
щие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:  
Пессарий акушерский разгружающий  
силиконовый №2*



*Ген. директор  
Метель С.Б.*

**Руководство по эксплуатации  
медицинского изделия Пессарии акупу  
по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018**

Медицинское изделие Пессарии акушерские раз (далее – «пессарии» или «ПАРС») предназначено с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦ) Вид МИ - 300810 ОКПД-2 - 32.50.13.190

Область применения – акушерство. ПАРС при специалистом.

Выпускаются ПАРС 3-х размеров:

- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый
- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый
- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый

Пессарии акушерские разгружающие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:

Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №3

Образец для государственной регистрации


Дата изготовления 2018-01 Годен до: 2021-01

Производитель:

ООО «Медицинское предприятие «Симург», РФ, 199178 г. Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., д.29, лит.3, офис А 417

тел.+7(812)3329170

WWW.SIMURG-MP.COM

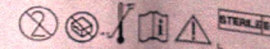

Не использовать повторно.  
Не применять при повреждении упаковки  
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации

15cm/200m  
LOT 3027812 201707

EO

processed

灭菌处理后指示标记为黄色  
gelb-yellow-giallo-amarillo-jaune



steriCLIN®

ISO 11607

REF 230110 LOT 3027812 201707

15cm/200m

Пессарии акушерские разгружающие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018:

Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №2

Образец для государственной регистрации

Дата изготовления 2018-01 Годен до: 2021-01

Производитель:

ООО «Медицинское предприятие «Симург», РФ, 199178 г. Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., д.29, лит.3, офис А 417  
тел.+7(812)3329170  
WWW.SIMURG-MP.COM



Не использовать повторно.  
Не применять при повреждении упаковки  
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри  
Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Фото Пессарии акушерские разгружающие силиконовые по ТУ 32.50.13-002-54183971-2018 Пессарий акушерский разгружающий силиконовый №3



Ген. директор  
Мещников С.А.