

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Тюменское протезно-ортопедическое предприятие»
агентства по здравоохранению и социальному развитию**

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№99-05-000005 от 28.10.04г.

Памятка по пользованию

Модульный протез стопы ПНО-Т

Модульный протез стопы ПН0-Т предназначен для протезирования пациентов всех половозрастных групп после односторонней или двусторонней ампутации на уровне стопы.

Протез предусмотрен для повседневного пользования.

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1. Протез состоит из приемной гильзы с мягким прокладочным материалом, искусственной стопы, регулировочно-соединительного узла, косметической оболочки и крепежной ленты. Широкий выбор искусственных стоп позволяет изготавливать протез с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические и другие характеристики инвалида, а также легко корректировать параметры сборки протезов при примерке и в процессе ходьбы.

2. НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗОМ

- 2.1. На протез надеть чулок или носок, затем обувь, на культю – чехол предохранительный.
- 2.2. С помощью чехла разместить культю в полости приемной гильзы. Надеть протез в положении «сидя» и зафиксировать креплением (при его наличии).
- 2.3. Проверить в положении «стоя» удобство размещения культи в приемной полости гильзы и надежность крепления.
- 2.4. Приемная гильза и крепление протеза не должны оказывать болевого воздействия на мягкие ткани и костные выступы культи.

3. УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ

3.1. Протез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

3.2. Внутреннюю полость приемной гильзы, вкладной гильзы периодически, не реже одного раза в неделю, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.

3.3. После использования в дождливую погоду в случае, если стопа, обувь и косметическая облицовка протеза промокли, необходимо снять обувь, а протез протереть и высушить.

3.4. Не рекомендуется хранить протез вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. УХОД ЗА КУЛЬТЕЙ

4.1. Ежедневно, после ходьбы на протезе, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов культы, мытье теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После мытья культы показан массаж культы, обработка кожи культы защитными, питательными кремами и лосьонами.

5. РЕМОНТ ПРОТЕЗА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение 12 месяцев при условии правильной эксплуатации.

5.2. Самостоятельная разборка и ремонт протеза запрещены.

5.3. При возникновении неполадок в протезе (появление люфтов, поломка стопы, элементов крепления, повреждения косметической оболочки и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее протез.