

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Тюменское протезно-ортопедическое предприятие»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию**

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№99-05-000005 от 28.10.04г.

Памятка по пользованию

**Ортопедические аппараты и тьюторы
(ортезы)**

Ортопедические аппараты и туторы для верхних и нижних конечностей (далее – ортезы) предназначены для ортезирования пациентов всех половозрастных групп для компенсации, восстановления или профилактики биомеханических нарушений функций опорно-двигательного аппарата при его травмах и заболеваниях различной тяжести. Ортез выполняет одну или несколько из перечисленных далее основных функций: фиксация, коррекция, компенсация и вытяжение.

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1. Ортез имеет модульную конструкцию, содержащую приемную гильзу, шины, шарниры, соединительные элементы, замковые устройства. Широкий выбор комплектующих позволяет изготавливать ортезы с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические, масс-инерционные и другие характеристики пациента. Фиксация ортеза на конечности пациента осуществляется в месте разъема гильзы при помощи застежек типа «Велкро».

2. НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТЕЗОМ

2.1. Поместить пораженную конечность в ортез и плотно зафиксировать ее креплениями.

Примечание: Не перетягивайте крепление. Застежки не должны вызывать болезненного давления на мягкие ткани и костные выступы, чтобы избежать потертостей, сдавливания мягких тканей, а также нарушения кровообращения.

2.2. Проверить удобство размещения конечности в ортезе и надежность крепления. При правильно надетом ортезе, приемная гильза и остальные модули не должны оказывать болевого воздействия на мягкие ткани конечности.

2.3. В случае применения в ортезе замковых устройств, необходимо проконтролировать срабатывание замкового механизма в разогнутом положении.

3. УХОД ЗА ОРТЕЗОМ

- 3.1. Ортез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.
- 3.2. Внутреннюю полость приемной гильзы не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.
- 3.3. Шарнирные соединения периодически (1-2 раза в месяц) смазывать машинным маслом, избыток масла удалять ветошью.
- 3.4. Не следует хранить ортез вблизи источника тепла, сушить на солнце. Металлические детали и элементы крепления следует предохранять от попадания влаги.

4. УХОД ЗА ПОРАЖЕННОЙ КОНЕЧНОСТЬЮ

- 4.1. Ежедневно, после использования ортеза, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов – обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж участков, подверженных повышенной нагрузке, а также обработка кожи защитными питательными кремами и лосьонами.

5. РЕМОНТ ОРТЕЗА

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу ортеза в течение 6 месяцев при условии правильной эксплуатации. Использование ортеза сверх срока службы не рекомендуется.
- 5.2. Самостоятельная разборка и ремонт ортеза запрещены.
- 5.3. В случае поломки или выхода из строя ортеза, при соблюдении условий эксплуатации, предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену ортеза бесплатно.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ ОРТЕЗА

В комплект поставки ортеза входит:

- ортез – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.