

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Тюменское протезно-ортопедическое предприятие»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№99-05-000005 от 28.10.04г.

Памятка по пользованию

Корсеты ортопедические жесткие

Корсеты ортопедические жесткие предназначены для ортезирования взрослых и детей при поражениях мышц и позвоночника в результате различных заболеваний.

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1. Корсеты имеют различную модульную конструкцию, содержащую такие элементы, как гильза корсета, пелоты, металлические шины, головодержатель, застежки типа «Велкро» и т.п. Широкий выбор комплектующих позволяет изготавливать корсет с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические, масс-инерционные и другие характеристики пациента, а также легко корректировать параметры сборки корсета при примерке и в процессе ходьбы.

2. НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОРСЕТОМ

- 2.1. Надеть тонкую майку или т.п.
 - 2.2. В положении «стоя» надеть корсет.
 - 2.3. Проследить, чтобы корсет плотно прилегал, но в то же время не вызывал сдавливания кожных покровов, нарушения кровообращения и затруднения дыхания.
 - 2.4. Застегнуть корсет.
- При правильно одетом корсете его элементы не должны вызывать болевых ощущений и неудобств при использовании.

3. УХОД ЗА КОРСЕТОМ

3.1. Корсет необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

3.2. Внутреннюю поверхность корсета не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.

3.3. После использования в дождливую погоду в случае, если корсет промок, необходимо снять корсет, протереть и высушить.

3.4. Не следует хранить корсет вблизи источника тепла, необходимо сушить при комнатной температуре в проветриваемом помещении.

4. УХОД ЗА ТЕЛОМ

4.1. Ежедневно, после ходьбы в корсете, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов тела, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж тела, обработка кожи защитными питательными кремами и лосьонами.

5. РЕМОНТ КОРСЕТА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу узлов корсета в течение 7 месяцев со дня выдачи при условии правильной эксплуатации.

5.2. Самостоятельная разборка и ремонт корсета запрещены.

5.3. При возникновении неполадок в корсете (появление люфтов, поломка крепления и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее корсет.