

ОКП 94 5210

Группа Р 28

УТВЕРЖДЕН
ЧТУП .942813.001 ПС-ЛУ

СТОЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ СКЛАДНОЙ
СПС-01

ПАСПОРТ

ЧТУП.942813.001 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru

СОДЕРЖАНИЕ

		Лист
1	Назначение изделия	3
2	Основные технические данные	3
3	Комплектность	3
4	Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)	4
5	Консервация	4
6	Свидетельство об упаковывании	4
7	Свидетельство о приемке	
8	Устройство и работа	4
9	Движение изделия при эксплуатации	5
10	Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям	6
11	Сведения об утилизации	6

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЧТУП.942813.001 ПС		
Разраб.	Никишин						Лит.	Лист	Листов
Пров.							001	2	7
Н.контр.							Стол перевязочный складной СПС-01		
Утв.							ЗАО НТФ "Перун"		

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Стол перевязочный складной СПС-01 (далее - стол) предназначен для перевязок и несложных хирургических вмешательств, в том числе в военно-полевых условиях.

1.2 Стол выпускается в двух исполнениях:

- стол СПС-01 ЧТУП.942813.001 без укладочного ящика;
- стол СПС-01 ЧТУП.942813.001-01 с укладочным ящиком.

1.3 Стол предназначен для эксплуатации при температуре от минус 25 до +45 °С и относительной влажности 100 % при 25 °С.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры и масса стола ЧТУП.942813.001, укладочного ящика ЧТУП.321167.001 (ящик), подставки съемной ЧТУП.325567.001 (подставки) указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Стол СПС-01 в развернутом положении	1900	530	830	29
Стол СПС-01 в сложенном положении	1080	530	140	29
Укладочный ящик в развернутом положении	1200	600	810	25
Укладочный ящик в сложенном положении	1200	600	205	25
Подставка	900	150	27	1,5

2.2 Максимальная нагрузка на центральную секцию стола - 90 кг.

2.3 Максимальная нагрузка на откидную секцию - 30 кг.

2.4 Максимальная нагрузка на подставку - 20 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки стола должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
ЧТУП.942813.001	Стол перевязочный складной СПС-01	1		
ЧТУП.321167.001	Укладочный ящик			
ЧТУП.325567.001	Съемная подставка	1		
ЧТУП.942813.001ПС	Паспорт	1		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЧТУП.942813.001 ПС

Лист

3

4 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Средний срок службы - 10 лет.

4.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

4.2.2 Гарантийный срок эксплуатации стола - 2 года со дня изготовления.

4.2.3 Условия хранения:

Закрытые помещения с естественной вентиляцией при температуре от +40 до минус 50 °С и относительной влажности не более 80% при температуре +25 °С.

4.2.4 По всем вопросам, возникающим при эксплуатации стола, обращаться по адресу: 300002, г. Тула, ул. Луначарского 1, оф. 215 (а/я 527) ЗАО НТФ "Перун", т. 39-47-71.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

5.1 При закладке стола на длительное хранение все шарнирные и винтовые соединения, не имеющие лакокрасочных покрытий, должны быть защищены смазкой Литол-24 или Литол-24рк, ГОИ-54п.

Таблица 3

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись
	Консервация	5	

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол перевязочный складной СПС-01 ЧТУП.942813.001 № _____ упакован ЗАО НТФ "Перун" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____

Личная подпись _____

Расшифровка _____

Дата _____

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол перевязочный складной СПС-01 ЧТУП.942813.001 № _____ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 9452-001-34416663-99 и признан годным для эксплуатации.

М. П. _____

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

8 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

8.1 Стол перевязочный складной СПС-01 состоит из двух основных частей:

Инд. № подл.	Подп. и дата
Инд. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

собственно стол и укладочный ящик. Стол представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из основной секции столешницы, двух откидных секций и ножек.

Ножки стола шарнирно соединены с основной секцией и, в развернутом положении, фиксируются распорками. Откидные секции с нижней стороны имеют разъемные соединения, которые позволяют устанавливать и фиксировать положения откидных секций с помощью зажимов. В каждой секции стола есть прорези, в которые вставляется штырь съемной подставки. Конструкция стола позволяет установить на нем складные санитарные носилки.

Укладочный ящик предназначен для хранения и транспортирования стола. В развернутом виде укладочный ящик может служить материальным столом.

8.2 Для подготовки стола к эксплуатации открыть крышку укладочного ящика, поднять до вертикального положения ножки укладочного ящика и зафиксировать их распорками. Вынуть стол и положить его на бок. Развернуть откидные секции стола, а затем и ножки стола, зафиксировать их распорками, извлечь подставку. Установить и зафиксировать зажимами положение откидных секций. Поставить стол на ножки. Установить, при необходимости, подставку в требуемое положение на поверхности стола.

При использовании укладочного ящика в качестве материального стола поставить его на ножки.

Складывание стола и размещение его в укладочном ящике производить в обратном порядке: ящик, используемый в качестве стола, перевернуть ножками вверх, снять подставку, положить стол на бок, отвинтить зажимы, сложить ножки с малым, а затем с большим шарниром, разместить подставку между внутренней стороной основания и ножками, сложить откидные секции, уложить стол в ящик, сложить ножки ящика, опустить крышку и закрыть замки.

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, Проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

9.2 Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЧТУП.942813.001 ПС	Лист
						5

9.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

9.4 Ограничения по транспортированию

Столы транспортируют всеми видами транспортных средств (крытых), кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования столов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

10 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер Бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	Проверившего работу

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы стол не представляет опасности для окружающей среды и может быть использован или подвергнут утилизации по усмотрению потребителя. Специальных мер по утилизации не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЧТУП.942813.001 ПС	Лист
						6

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительно-го докум. и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Анулированных					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ЧТУП.942813.001 ПС									Лист
									7

Копировал

Формат А4