


## ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации готовых очковых линз

1. Готовые очковые линзы рекомендуется устанавливать в очковые оправы любых типов (пластмассовые, металлические, комбинированные, полуободковые и безободковые).
2. Линзы очковые должны быть упакованы в индивидуальную упаковочную тару на которой указываются:
  - товарный знак завода-изготовителя;
  - надпись «Линза очковая»;
  - номинальное значение диаметра линзы;
  - номинальные значения основных параметров линзы;
  - обозначение типа и исполнения линзы;
  - обозначение стандарта.
3. Линзы очковые должны эксплуатироваться, без потери своих свойств, при температуре от плюс 50 °С до минус 50 °С при 100% влажности воздуха и температуре 25 °С.
4. Изъятие линз очковых из индивидуальной упаковочной тары производить чистыми руками, не касаясь рабочих поверхностей изделия.
5. Во избежание механического разрушения не допускаются резкие воздействия на линзы очковые.
6. Запрещается подвергать линзы очковые термоударам (резкие перепады температур).
7. Протирать очковые линзы из полимерных материалов следует только в увлажненном состоянии бумажными салфетками или специальными салфетками, предлагаемые в специализированных оптических салонах и ателье.
8. Во избежание механического разрушения при работе с линзами очковыми на обрабатывающих станках необходимо обеспечивать номинальную нагрузку при зажиме линзы в фиксирующих адаптерах.

Директор

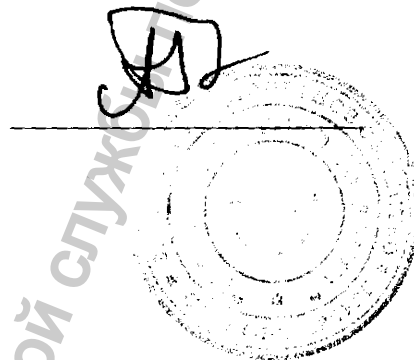

А.А.Голубцов