

## ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КОРСЕТОМ-БАНДАЖОМ БНЗ-09

Корсет – бандаж применяется при опущении внутренних органах брюшной полости, грыжах различной формы.

### **Описание корсета – бандажа**

Корсет – бандаж изготавливается из ткани х/б, имеет четыре металлических ребра жесткости. Две пары дополнительных, эластичных затяжек улучшают поддержку и позволяют регулировать степень затягивания корсета – бандажа.

### **Надевание корсета – бандажа.**

Корсет – бандаж застегивается сбоку на пуговицах и регулируется сзади шнуровкой, при этом вставленные планшеты должны быть равномерно и симметрично расположены по обеим сторонам позвоночника. Корсет – бандаж целесообразно надевать в положении лежа.

### **Уход за корсетом – бандажом.**

Стирать вручную в теплой воде с применением мягких моющих средств. Полотенцем удалить остатки воды, не выкручивать и не отжимать. При стирке необходимо вынимать, если позволяет конструкция, планшеты. Сушка на нагревательных приборах запрещена.



## ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БАНДАЖОМ БНЗ-01

Бандаж БНЗ-01 предназначен при опущении и заболевании почек.

### **Описание бандажа.**

Бандаж изготавливается из ткани х/б, имеет металлические ребра жесткости, подбедренники из ткани х/б и эластичные тяжи, позволяющие регулировать степень затягивания бандажа.

### **Надевание бандажа.**

Бандаж надевается в положении «лежа», сбоку застежка на пуговицах, сзади регулируется шнуровка.

### **Уход за бандажом.**

Стирать бандаж вручную, в теплой воде с применением моющих средств. Не выжимать и не выкручивать. Сушка на нагревательных приборах запрещена.



## ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЛФ

Бюстгальтер ЛФ предназначен для фиксации протеза молочной железы.

### **Описание бюстгальтера.**

Бюстгальтер изготавливается из ткани х/б, с изнаночной стороны на чашку должен быть настроен клапан из ткани х/б. Застежки бюстгальтера могут быть на пуговицах и петлях, крючках и петлях на пряжках.

### **Уход за бюстгальтером.**

Стирать бюстгальтер в теплой воде с применением моющих средств.

