

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие)



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdramnadzor.ru

В упаковке содержатся десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным Отривин Бэби, который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко проникать в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что гарантирует чистое и гигиеничное использование.

Аспиратор назальный Отривин Бэби предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего детского возраста). Аспиратор очищает нос Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его слизистые выделения.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями или спреем Отривин Бэби.



Способ применения

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот для родителей и держите его над ребенком и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи резинового шланга, пока мундштук (С) не наполнится выделениями.
4. Если насадка заполняется выделениями в процессе втягивания воздуха, выньте насадки в салфетку, прочищая мундштук (С) и шланг (D) в салфетку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку.

В целях соблюдения гигиены и для предотвращения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.



Произведено Stiplastik® - 62 Chemin des Plantées - 38160 SAINT-MARCELLIN - FRANCE

Produced by Stiplastics - 62 Chemin des Plantées - 38160 SAINT-MARCELLIN - FRANCE

Годен до:

05 2014

Серия №:

1 6 3

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru






Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)





Виробники: GSK Консьюмер Хелскаер С.А., Рут де Летра, 1260 Нюн, Швейцарія /
GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Étraz, 1260 Nyon, Switzerland
на заводі:
STIPLASTICS, 62 Шемєн де Планте, 38160 Сєн Марселєн, Франція /
STIPLASTICS, 62 Chemin des Plantées, 38160 Saint Marcellin, France

Термін придатності: 10 2022
19214

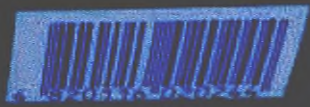

Информация получена с официального сайта
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.goszdramozog.ru


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdramnadzor.ru



ПРОШИТО И ОПЕЧАТАНО
ЛИСТА (-ОВ)

Верность копий документов и подлинность
оригиналов удостоверяю.

Специалист по регистрации
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»

 / Е.А.Ключко /
м.п. 05.08. 2020 г.



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru