



## ООО «Медтехника Реботек»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

тел: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: [info@rebotec.net](mailto:info@rebotec.net)



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Костыли локтевые на 4 ножках

#### Применение

Костыли локтевые на 4 ножках (далее костыли) предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения повышенной надежности при ходьбе. Данный предмет можно использовать как дома, так и на улице. Для этого строго следуйте указаниям по технике безопасности.


Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

## Инструкция по монтажу и эксплуатации


### Регулировка высоты костылей

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку.

- Ослабить резьбовое соединение шумоизоляционной гайки, повернув влево (A).
- Нажимную кнопку вдавить в отверстие (B) или вынуть клип-фиксатор (C).
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку или зашелкнуть клип-фиксатор.
- Резьбовое соединение затянуть, прокрутив вправо (A). (Если Вы затянете потуже, тем самым избежите появления различных звуков при использовании.)

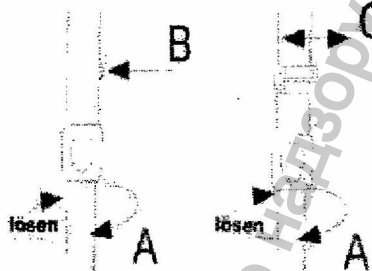


### Регулировка высоты подлокотника

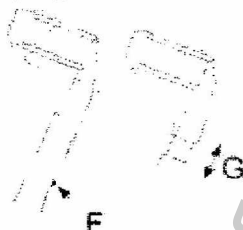

- Нажать кнопку в отверстие (F).
- Подлокотник привести в желаемое положение (G).
- Кнопку зафиксировать в отверстии (F).

### Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (E). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию. Убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

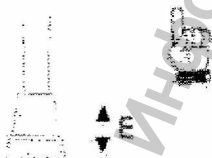

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластина. Она защищает наконечник от прерыва трубочкой трости или костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

## **Техническое обслуживание**

### **Уход**

Трубку костыля достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

### **Обслуживание**

Перед каждым использованием проверяйте костыли на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор, нажимная кнопка и наконечник прочно закреплены, а труба находится в правильном положении. При деформации или повреждении продукт нужно немедленно проверить. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

### **Ремонт**

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

## **Инструкции по технике безопасности**

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.



Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания

- Регулярно проверяйте наконечники на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе костыли должны быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте их далеко от туловища.
- Используйте костыли только в качестве поддержки при ходьбе.
- Ни в коем случае ее нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не допускать попадания на костыли солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Используйте костыли без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.