

Инструкция по применению

СИСТЕЙН™ глазные капли-любрикант

ОПИСАНИЕ:

СИСТЕЙН™ глазные капли-любрикант - стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400, пропилен гликоль, гидроксипропилгуар, борная кислота, кальция хлорид, магния хлорид, калия хлорид, натрия хлорид, цинка хлорид, ПОЛИКВАД ® (хлорид полидрония) 0,001%.

ПОКАЗАНИЯ

СИСТЕЙН™ глазные капли-любрикант увлажняет, обеспечивает комфорт и предохраняет глаза от сухости, раздражения, чувства жжения, чувства инородного тела или песка, вызванные пылью, дымом, ультрафиолетовыми лучами, сухим жаром (радиатор, сауна), кондиционером, ветром, косметикой, мерцанием длительно работающего телевизора или монитором компьютера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата СИСТЕЙН™ глазные капли-любрикант.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

СИСТЕЙН™ глазные капли-любрикант могут применяться по мере необходимости на протяжении дня для увлажнения и увеличения комфорта глаз. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Необходимо, чтобы вы следовали указаниям вашего глазного врача и инструкциям по использованию всех медицинских препаратов. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснения глаз, проконсультируйтесь с глазным врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Храните флакон плотно закрытым.

Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке. Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.

ФОРМА ВЫПУСКА:

СИСТЕЙН™ глазные капли-лубрикант выпускаются во флаконах по 3 мл, 5 мл, 10 мл и 15 мл.

Производитель:

Alcon Cusi S.A. / Алкон Кузи С.А.

С/ Камил Фабра, 58

08320 Эль Масноу, Барселона, Испания.

Представительство компании «Алкон Фармасьютикалз Лтд.»

109004, Москва, ул. Николоямская, 54.


Тел. 961-13-33

Сапунова




Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

<h1>AlconCusí</h1>	ESTUCHE		Nº Registro: 1910
	Código: 8-77-270	Sustituye Código: NP	Nº Plano: MT0052
Producto: CJ. SYSTANE 10 ml G.E.V.	Código Laetus: 195 (2111211)	Tipo: MINICODIGO	
Nº Colores para la Impresión: 4 Tintas	Troquel: A-80	Proveedor: CARTONPLEX	
OBSERVACIONES: - Nueva presentación SYSTANE 10 ml G.E.V.			

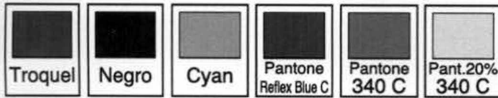

OBSERVACION: (Tonos de color no válidos para impresión)

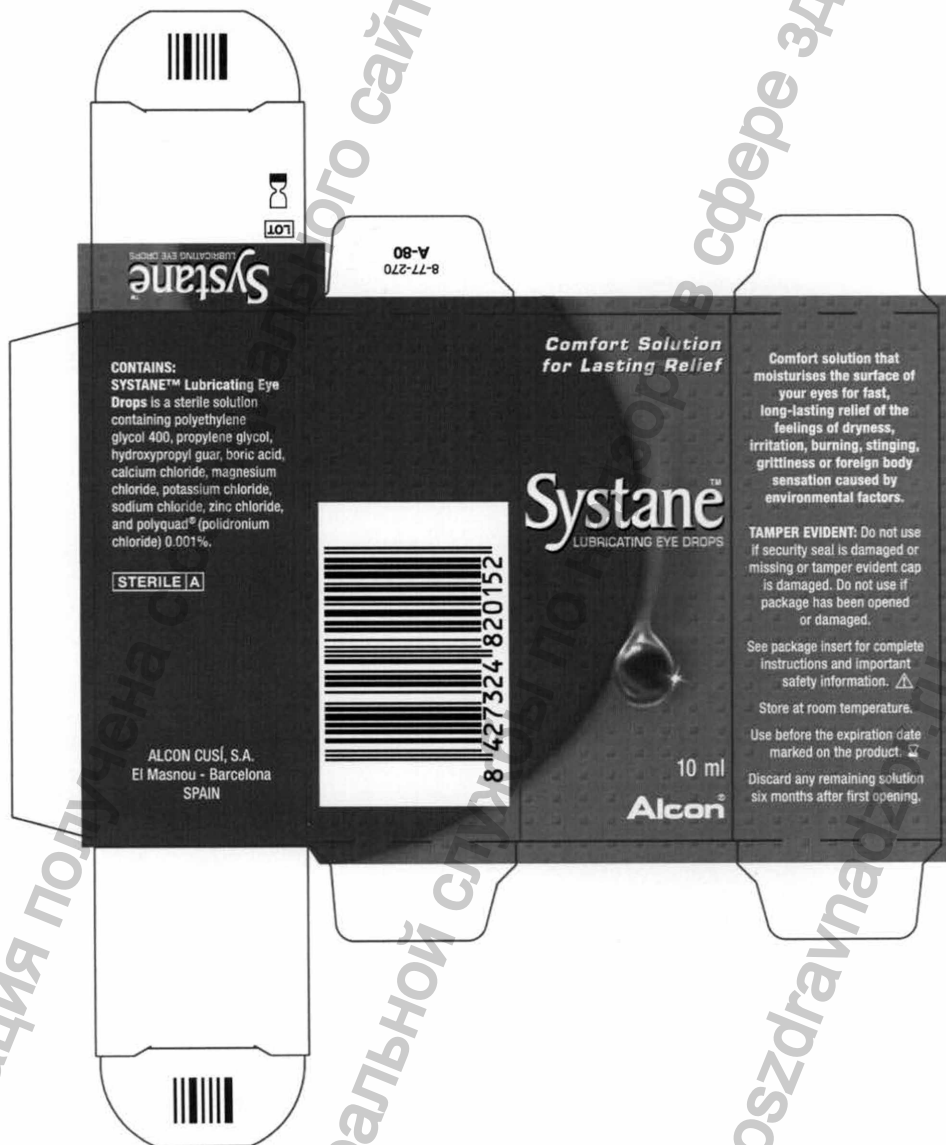

APPROBACION	D.M.S.	REGISTROS	MARKETING	EXPORT	(M.A.)	CLIENTE
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
	Fecha/Firma	Fecha/Firma	Fecha/Firma	Fecha/Firma	Fecha/Firma	Fecha/Firma