

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРТОС»
(ООО «НОЦ «ОРТОС»)

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО «НОЦ «ОРТОС»



Т. Д. Медведева

« _____ » _____ года

**ТУТОРЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ТР8-20-ОС**

Памятка по пользованию

Туторы на всю руку TP8-20-OC предназначены для ортезирования пациентов всех половозрастных групп при последствиях повреждения суставов верхней конечности, травмах костей предплечья и плеча, ложных суставах плечевой кости и костей предплечья, а также последствиях ДЦП.

1 Описание конструкции

Тутор состоит из комбинированной гильзы плеча, предплечья и кисти, застежек типа «Велкро» и смягчающих элементов. Туторы изготавливаются с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические и другие особенности пациента.

2 Надевание и использование тутора

2.1. Надеть тутор на руку.

2.2. Проследить, чтобы гильза тутора плотно прилегала, элементы крепления были правильно расположены, но в то же время не вызывали сдавливания кожных покровов и нарушения кровообращения.

2.4 Последовательно застегнуть все крепления тутора.

При правильно надетом туторе гильза и элементы крепления не должны оказывать болевого воздействия на мягкие ткани верхней конечности.

3 Уход за тутором

3.1 Тутор необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

3.2 Внутреннюю поверхность гильзы тутора не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.

3.3 После использования в дождливую погоду в случае, если татор промок его необходимо протереть и высушить.

3.4 Не следует хранить татор вблизи источника тепла. Сушить татор при комнатной температуре в проветриваемом помещении.

4 Уход за пораженной конечностью

4.1 Ежедневно, после эксплуатации татора, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов верхней конечности, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж верхней конечности, обработка кожи конечности защитными питательными кремами и лосьонами.

4.2 Каждое утро перед надеванием татора необходимо выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений, рекомендованных врачом-ортопедом.

5 Ремонт татора

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу элементов татора в течение семи месяцев со дня выдачи при условии правильной эксплуатации.

5.2 Самостоятельная разборка и ремонт татора запрещены.

5.3 При возникновении неполадок в таторе (механическое разрушение гильзы, поломка крепления и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее татор.