

## ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации спринцовок пластизольных поливинилхлоридных

Спринцовки применяют для медицинских целей в лечебных учреждениях для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из полостей организма и для индивидуального пользования.

Номер спринцовки указан на основании изделия.

**ВНИМАНИЕ:** спринцовки для маслосодержащих сред не применять!

Перед применением спринцовки следует продезинфицировать методом кипячения в дистиллированной воде в течение  $(10 \pm 5)$  мин.

Наконечники стерилизуют обработкой в 6%-ном растворе перекиси водорода с последующим промыванием в проточной воде.

Перед применением наконечники спринцовок смазывают вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром.

Спринцовки не должны контактировать с лекарственными растворами более 30 мин.

После применения спринцовку промывают горячей водой для удаления лекарственного раствора и просушивают.

Хранение спринцовок должно осуществляться в помещении при температуре от  $5^{\circ}\text{C}$  до  $40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Изготовитель гарантирует качество спринцовок при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности спринцовок 5 лет со дня изготовления.



Адрес предприятия-изготовителя:  
Московская область, Клинский р-он,  
д. Новошапово, д.16, стр. 2

Дата изготовления