

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по эксплуатации молокоотсоса-отсасывателя  
индивидуального ручного МОН-«АП»

Молокоотсос применяется для отсасывания молока у кормящих матерей.

Область применения – индивидуальное использование в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Молокоотсос разборный и состоит из пластизольного баллона и резервуара из стекла или пластмассы. Перед использованием молокоотсос следует продезинфицировать: резервуар прокипятить в течении (10±5) минут, а баллон обработать 6%-ным раствором перекиси водорода с последующим промыванием в проточной воде.

После применения молокоотсос промывают горячей водой и просушивают.

Хранение молокоотсоса должно осуществляться в помещении при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Изготовитель гарантирует качество молокоотсоса при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности молокоотсоса – 5 лет со дня изготовления.



Адрес предприятия-изготовителя:  
Московская область, Клинский р-он,  
д. Новошапово, д.16, стр. 2

Дата изготовления