

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Трости опорные с принадлежностями серии С в вариантах
исполнения с УПС и БЕЗ:
С Standart, С Fold, С Hook, С Soft, С Comfort, С Touch, С Rest, С
Olever (размеры S,L), С Delta, С Pyramid**



СИМС-2

Применение


Трости опорные предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения надежности при ходьбе. Данный продукт можно использовать как дома, так и на улице. Для этого строго следуйте указаниям по технике безопасности.

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку

Установка высоты тростей

- Ослабить резьбовое соединение шумоизоляционной гайки, повернув влево (А).
- Нажимную кнопку вдавить в отверстие (В) или вынуть клип-фиксатор (С).
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку или защелкнуть клип-фиксатор.
- Резьбовое соединение затянуть, прокрутив вправо (А) (если Вы затянете потуже, тем самым избежите появления различных звуков при использовании).

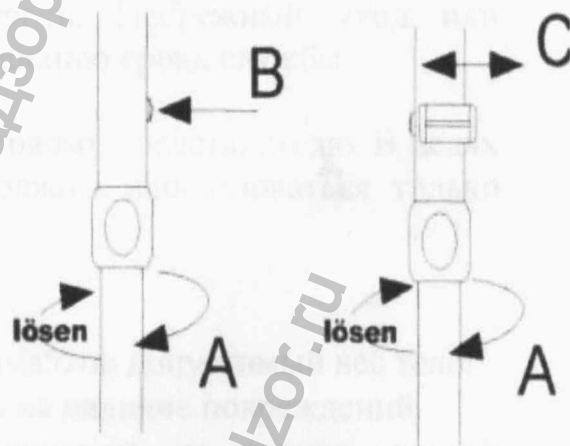

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.



Техническое обслуживание

Уход

Трубку трости достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте трости на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор, нажимная кнопка и наконечник прочно закреплены, а труба находится в правильном положении. При деформации или повреждении трости нужно немедленно проверить. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте трость на наличие повреждений.
- При прохождении лестницы одной рукой держитесь за перила, другой опирайтесь на трость.
- Регулярно проверяйте наконечник на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе трость должна быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте её далеко от туловища.
- Используйте трость только в качестве поддержки при ходьбе.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не используйте трость без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.



СИМС-2

Технические характеристики

Модель	Высота, см	Материал рукоятки	Трубка		Шаг регулировки высоты, см	Максимальная нагрузка, кг
			Диаметр, мм	Материал		
C Standart	71,5-94,5	ПВХ	22	алюминий	2,5	100
C Fold	81-91	ПВХ	22	алюминий	2,5	80
C Hook	68,5-91,5	ПВХ	22	алюминий	2,5	100
C Soft	74-97	ПВХ	22	алюминий	2,5	100
C Comfort	80-103	ПВХ	22	алюминий	2,5	100
C Touch	126	ПВХ	22	алюминий	-	80
C Rest	85,5	ПВХ	22	алюминий	2,5	80
C Qlever (размеры S,L)	72-95	ПВХ	22	алюминий	2,5	110
C Delta	74-97	ПВХ	22	алюминий	2,5	110
C Pyramid	74-97	ПВХ	22	алюминий	2,5	110

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **6 месяцев** со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен только в компании ООО «СИМС-2» с применением оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - **24 месяца**

Регистрационное удостоверение № _____, сертификат соответствия № РОСС

Дата продажи: « »

Генеральный директор

ООО «СИМС-2»



Бадалян С.П.



Техническое задание

Материал	Ширина	Высота	Длина	Материал	Материал	Материал
100	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	С Standart
80	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	С Fold
100	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	С Hook
100	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	
10	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	
80	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	
80	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	
110	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	
110	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	
110	2,5	22	22	ПВХ	ПВХ	

Всего прошнуровано,
 пронумеровано и скреплено
 печатью 4 листа



А.И. Базанер
 Директор

Информация получена с официального сайта
 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdravnadzor.ru