

ШПАТЕЛИ ГЛАЗНЫЕ (КОМПЛЕКТ ИЗ 4 НАИМЕНОВАНИЙ)

ЭТИКЕТКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Шпатели глазные (комплект из 4 наименований) предназначены для раздвигания тканей, для туалета внутриглазных тканей при операциях на глазном яблоке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|----------|
| 1. Шпатель глазной изогнутый микрохирургический 8x1 мм | - 1 шт. |
| 2. Шпатель глазной изогнутый микрохирургический 10x0,5 мм | - 1 шт. |
| 3. Шпатель для расслаивания склеры | - 1 шт. |
| 4. Шпатель для циклодиализа | - 1 шт. |
| <u>Эксплуатационная документация</u> | |
| 6. Этикетка | - 1 экз. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шпатель глазной изогнутый микрохирургический 8x1 мм

Основные размеры, в мм:

Длина	- 125
Ширина рабочей части	- 1
Длина рабочей части	- 8

Шпатель глазной изогнутый микрохирургический 10x0,5 мм

Основные размеры, мм:

Длина	- 125
Ширина рабочей части	- 0,5
Длина рабочей части	- 10

Шпатель для расслаивания склеры

Основные размеры, мм:

Длина	- 130
Ширина рабочей части	- 2
Высотагиба рабочей части	- 2,5

Шпатель для циклодиализа

Основные размеры, мм:

Длина	- 125
Ширина рабочей части	- 1,5
Высотагиба рабочей части	- 10

Рабочие части шпателей изготовлены из нержавеющей стали, ручки – из титанового сплава, имеют матовую поверхность.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Шпатели устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре $(120 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение (45 ± 5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см^3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре $(180 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение (60 ± 5) мин.

ХРАНЕНИЕ

Храниться комплект шпателей должен при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C . Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект шпателей соответствуют требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК N 1 Упаковщик N 1 Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта шпателей требованиям технических условий ТУ 9434-081-07613473-2007 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данной этикеткой по адресу:


143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru

Генеральный директор ОАО «Можайский
медико-инструментальный завод

Н.В.Мастыко

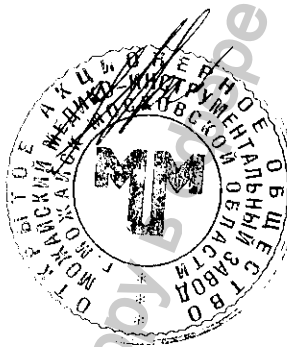

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.goszdravnadzor.ru