


**Федеральное агентство
по здравоохранению и социальному развитию**

**Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Смоленское протезно-ортопедическое предприятие» Росздрава**

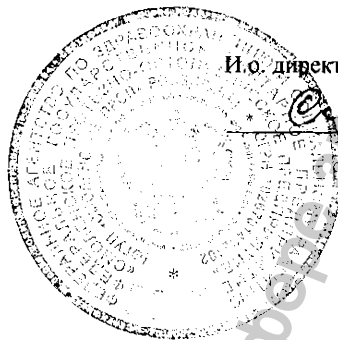

Утверждаю
И.о. директора ФГУП «Смоленское ПрОП»
Росздрава
С.А.Смагина

Протез голени

ПНЗЭ

Памятка по пользованию

ГСЛИ. 944512.002 Д50

Согласовано:
Главный врач
ФГУП «Смоленское ПрОП» РОСЗДРАВА
В.В.Егоренкова

Протез голени ПНЗЭ ГСЛИ.944512.002, в дальнейшем – протез предназначен для протезирования больных после односторонней или двухсторонней ампутации голени.

1. ОПИСАНИЕ ПРОТЕЗА

Протез голени (рисунок) состоит из модуля искусственной стопы со щиколоткой поз. 1, модуля несущего поз. 2 в виде трубки с запрессованной в нижней части втулкой, втулки поз. 3, гильзы голени поз. 5 с опорой в ряде случаев со смягчающим вкладышем из вспененного полиэтилена толщиной 1,5-5 мм (по медицинским показаниям).

В искусственной стопе со щиколоткой поз. 1 возможна регулировка жесткости заднего амортизатора, его замена, а также возможна перемена высоты каблука в двух положениях.

С помощью четырех винтов втулки модуля несущего поз. 2 и втулки поз. 3, путем их регулировки можно производить горизонтальное смещение стопы протеза от технологической базы во фронтальной и сагиттальной плоскости.

Смягчающий вкладыш изготавливается из вспененного полиэтилена толщиной 1,5-5 мм по гипсовому позитиву культы.

2. НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА

При надевании протеза необходимо пользоваться чехлом. Перед надеванием рекомендуется провести туалет культы или обтереть её влажным полотенцем. Затем на культю надевается предохранительный чехол (хлопчатобумажный или шерстяной в зависимости от сезона). Чехол разглаживают по культте так, чтобы не было складок, и затем погружают культю в приемную гильзу до полного контакта по всей поверхности культы.

При использовании смягчающего вкладыша на культю надевается предохранительный чехол, затем смягчающий вкладыш и культю со смягчающим вкладышем погружают в жесткую приемную гильзу протеза.

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗОМ

Протез собирается со стопой, рассчитанной на определенную высоту каблука. Поэтому не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука. При невыполнении этого условия изменяется устойчивость протеза и распределение давления на культю в приемной гильзе протеза.

Пользоваться протезом можно в течение всего дня. В процессе пользования протезом может измениться объем культы. В этом случае необходимо регулировать число чехлов, надеваемых на культю. Однако, общее число чехлов не должно превышать трех. Если требуется большее число чехлов, это говорит об атрофии культы и инвалиду в этом случае необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие для корректировки или замены приемной гильзы протеза.

4. УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ

При пользовании протезом необходимо выполнять следующие требования: содержать в чистоте приемную гильзу протеза, протирая её влажной салфеткой; тщательно проветривать приемную гильзу; ежедневно стирать чехлы и просушивать их. Один раз в три месяца нужно проверить степень износа амортизатора в стопе и, если необходимо, заменить его на протезно-ортопедическом предприятии.

5. УХОД ЗА КУЛЬТЁЙ

При пользовании протезом культю необходимо ежедневно обмывать теплой водой с мылом. Утром, после гигиенической и лечебной гимнастики, культю обтирают влажным полотенцем. После снятия протеза следует осмотреть культю. Если на ней имеются участки резкого покраснения или наоборот побледнение, то следует обмыть теплой водой с мылом, насухо обтереть и произвести легкий массаж измененных участков кожи и всей культи.

В случае появления на коже культы потертостей, ссадин, гнойничков их обрабатывают раствором бриллиантовой зелени. При распространении гнойничковой сыпи, образовании ран, болезненных наминов, травматических язв необходимо временно прекратить пользоваться протезом и обратиться в лечебное учреждение.

КОМПЛЕКТОВКА ПРОТЕЗА

В комплект поставки протеза входит:

- | | |
|---|---------|
| 1. Протез | – 1 шт. |
| 2. Чехол трикотажный шерстяной | – 4 шт. |
| 3. Чулок косметический | – 2 шт. |
| 4. Ключи 7812-0273 4ОХФАН12х1 ГОСТ 11737-74 | - 1 шт. |
| 7812-374 4ОХФАН12х1 ГОСТ 11737-74 | - 1 шт. |
| 5. Памятка по пользованию | – 1 шт. |
| 6. Чехол-футляр | – 1 шт. |