

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»



С.М. Хардина
С.М. Хардина
«15 мая» 2020 г.

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-"Медплант" по ТУ 9437-002-91531720-2012

Руководство по эксплуатации

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 21.20.24.170
ТУ 9437-002-91531720-2012
Рег. уд. № ФСР 2012/14138 от _____.20__г

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов

УППржд-02-«Медплант»

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942419.001.005 РЭ



Перед началом работы с укладкой
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

Ver 003

Назначение: Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-«Медплант» предназначена для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте.

Область применения: железнодорожный транспорт.

Основные технические характеристики набора:

Габаритные размеры: 230×90×190 мм.

Масса укладки с вложениями: 0,4 кг.

Комплект поставки:

1. Набор вложений (согласно Табл. 1);
2. Сумка медицинская универсальная СМУ-04.2;
3. Руководство по эксплуатации.

Описание изделия:

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-«Медплант» выполнена в соответствии с *приложением 2 приказа МЗ РФ №498н от 5 мая 2012г.* и представляет собой комплект изделий медицинского назначения, позволяющий оказывать первую помощь пострадавшим на железнодорожном транспорте. Набор упакован в сумку медицинскую универсальную СМУ-04.2 (рис. 1).

Сумка СМУ-04.2 изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, передняя часть сделана прозрачной для обзора содержимого. Она имеет простую конструкцию и обеспечивает удобное расположение и быстрый доступ к вложениям. Для удобства переноски сумка снабжена ремешком на руку.

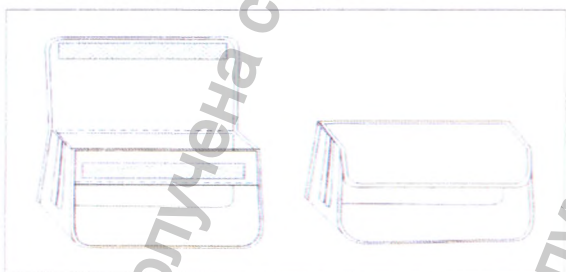


Рис. 1. Сумка СМУ-04.2.

Правила эксплуатации :

- 1) Перед началом работы с укладкой внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в её состав.
- 2) При транспортировке укладки и работе с ней избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению сумки и вложений. Чтобы исключить повреждения укладки не нагружайте её более чем на 1 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевают срок её службы.
- 3) По истечению сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, и в случае их использования, укладку необходимо пополнить. Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.

- 4) Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.
- 5) После окончания работы не убирайте загрязнённое имущество обратно в сумку. Для сбора и утилизации отходов, а так же загрязненного имущества, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (п.п. 3.2. Табл. №1) или футляр-контейнер пластиковый (п.п. 3.3. Табл. №1).
- 6) Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения и оказанию первой помощи помогут Вам в работе с укладкой, но тем не менее к работе допускается только персонал, прошедший соответствующую подготовку по оказанию первой медицинской помощи.
- 7) При необходимости дезинфекция сумки СМУ-04.2 производится 2-х кратным протиранием салфеткой, смоченной в 3 %-ном растворе хлорамина, с интервалом 15 мин. и выдержкой после этого 60 мин. (по МУ287-113).

Обработка сумки спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается!!!

Гарантии изготовителя: гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на вложения (перевязочные и расходные материалы, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций).

Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

ООО «МЕДПЛАНТ», адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт. 2, пом. I, ком. 296-318

телефон: 8 (495) 223-6016;

e-mail: medplant@medplant.ru.

Перечень вложений

п/п	Наименование	Кол-во
1	<i>Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран</i>	
1.1	Жгут кровоостанавливающий резиновый	1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x10 см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x14 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x5 см	1 шт.
1.5	Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	1 шт.
1.7	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.8	Салфетки марлевые медицинские стерильные №10 16 см x 14 см	1 уп.
2	<i>Прочие изделия медицинского назначения</i>	

2.1	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размером не менее «М»	2 пар
2.2	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками	2 шт.
2.3	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые 12,5 см x 11,0 см	3 шт.
3	Прочие средства	
3.1	Рекомендации с пиктограммами	1 шт.
3.2	Мешок полиэтиленовый с зажимом размером не менее 20 см x 25 см	1 шт.
3.3	Футляр-контейнер пластиковый	1 шт.
3.4	Маркер перманентный черного цвета	1 шт.

Свидетельство о приёмке: Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования УППржд-02-«Медплант» в сумке тканевой медицинской универсальной СМУ-04.2 (арт. 1162) соответствует ТУ 9437-002-91531720-2012 и признана годной к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью 5

цифрами

(пять) прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДИЛАНТ"

Хардина С.М. С. Хардина

подпись



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru