

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Протеза предплечья с тяговым управлением ПР2-ТОБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Протез предплечья с тяговым управлением (далее – протез) предназначен для предоставления возможности инвалидам самостоятельно выполнять действия, необходимые при самообслуживании, работе (исключая тяжелую), отдыхе, а так же для возмещения косметического дефекта при односторонней или двусторонней ампутации предплечья.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протез предплечья собран из следующих основных узлов производства фирмы «ОТТО БОКК» Германия: системной искусственной кисти, лучезапястного узла, гильзы предплечья, а так же косметической оболочки и крепления.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кожные заболевания культи.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием освободить протез от упаковки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Надеть на культю один конец трикотажного рукава.
- Другой конец рукава продеть в приемную гильзу и вытащить через специальное отверстие в дистальной части приемной гильзы.
- Одновременно вставить культю в приемную гильзу протеза и тянуть за свободный конец рукава до фиксации протеза мышечковыми захватами на локтевом суставе. При правильно надетом протезе приемная гильза не должна оказывать болевого действия на мягкие ткани культи.
- Для того чтобы раскрыть кисть, нужно вытянуть протез вперед. Сработают тяги бандажа, и кисть под воздействием механических усилий откроется.
- Для закрытия кисти или захвата предмета необходимо ослабить усилие воздействия тяги на кисть, и она автоматически закроется.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Протез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов.
- Внутреннюю полость приемной гильзы рекомендуется не реже 1 раза в день протирать мягкой белой тканью, увлажненной раствором нейтральных моющих средств, затем просушить.
- Косметическую оболочку (перчатку) протеза необходимо ежедневно смазывать защитным дневным кремом для рук (например, силиконовым) для создания тонкой защитной пленки на поверхности перчатки.
- Для сохранения внешнего вида косметической перчатки необходимо избегать контакта с печатной продукцией (газеты, книги и т.д.), а так же аккуратно пользоваться шариковыми авторучками
- При загрязнении косметической перчатки необходимо нанести специальное чистящее средство 640F12 с помощью пульверизатора 640F13 (производство «ОТТО БОКК») на поверхность перчатки и протереть белой тканью, после чего вновь смазать косметическую перчатку кремом для рук.
- Не рекомендуется хранить протез вблизи от источника тепла, сушить на солнце.
- Ежедневно необходимо проводить обмывание кожных покровов культи теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо.
- Рекомендуется массаж культи, обработка кожи культи защитными, питательными кремами и лосьонами.
- Запрещается самостоятельная разборка и ремонт протеза.
- При возникновении неполадок в протезе необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее протез.

И.О. директора предприятия Смирнова

