

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Реклинатора текстильного КР1-01

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Реклинатор текстильный (далее – реклинатор) предназначен для исправления и формирования осанки у детей и подростков при начальных формах сутуловатости.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реклинатор состоит из двух полочек, изготовленных из ткани хлопчатобумажной бельевой, двух наплечников, изготовленных из ленты эластичной подвязочной, подушек из войлока, покрытых сверху оболочкой из юфти облямовочной. Для придания жесткости полочки реклинатора усилены планшетами. Крепление реклинатора осуществляется с помощью шнуровки или застежки «Контакт».

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кожные заболевания.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием освободить реклинатор от упаковки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Реклинатор надевается на пациента в положении «стоя» поверх хлопчатобумажного белья.
- Руки продевают в петли, пациент разводит плечи, полочки перекрещиваются на спине и застегиваются спереди с помощью шнуровки или застежки «Контакт».

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Режим и сроки пользования реклинатором определяются лечащим врачом.
- При пользовании реклинатором следует оберегать его от соприкосновения с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.
- В случае загрязнения рекомендуется постирать реклинатор ручным способом без выкручивания в теплой воде с добавлением нейтральных моющих средств или детского мыла. Затем просушить в расправленном виде на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла.
- Не реже одного раза в сутки следует проводить гигиеническую обработку кожных покровов тела теплым мыльным раствором.
- Реклинатор должен храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре от минус 15⁰ до плюс 25С⁰ и относительной влажности воздуха от 50 до 80%.

Директор предприятия


И.К. Дроздина