

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бандажа ортопедического на плечевой сустав БН6-61

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж ортопедический на плечевой сустав (далее - бандаж) назначается для фиксации и ограничения движения в плечевом суставе в период реабилитации после травм и операций в области плечевого сустава, при привычных вывихах плеча.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бандаж изготовлен из ткани «Ортопрен» составным из наплечника, манжеты плеча и ремня, пришитого к наплечнику. Застежка бандажа изготовлена из ленты текстильной «Контакт».
- Поверхностная плотность бандажа должна быть не менее 550г/м² и растяжимость от 20 до 50% по ГОСТ Р 51219.
- Масса бандажа не превышает 0,30 кг

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кожные и сосудистые заболевания верхней конечности.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием бандажа на область плечевого сустава надеть хлопчатобумажное белье.


4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Бандаж надеть на область плечевого сустава в положении «стоя» поверх хлопчатобумажного белья.
- Зафиксировать бандаж на теле при помощи ремня, продев его через пластмассовую рамку и застегнув на боковой поверхности тела пациента текстильной застежкой «Контакт».
- Степень фиксации бандажа на плече регулируется при помощи текстильной застежки «Контакт».

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Режим и сроки пользования бандажом определяются лечащим врачом.
- При пользовании бандажом следует оберегать его от соприкосновения с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.
- Бандаж рекомендуется стирать ручным способом без выкручивания в теплой воде с добавлением нейтральных моющих средств или детского мыла.
- Бандаж рекомендуется сушить в расправленном виде на горизонтальной поверхности, вдали от источников тепла.
- Бандаж должен храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре от 5 до 20С⁰ и относительной влажности воздуха от 50 до 80%.
- Не реже двух раз в сутки следует проводить гигиеническую обработку кожных покровов тела теплым мыльным раствором.

Директор предприятия

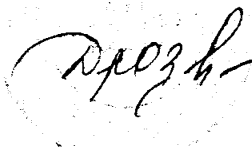

И.К. Дроздина