

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

корсета - сиденье КР0-С

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Корсет - сиденье КР0-С (далее – корсет) предназначен для ортезирования детей в возрасте старше одного года, не имеющих в достаточной степени способности к самостоятельному удержанию устойчивой позы «сидя» с целью проведения постуральной терапии (лечение положением тела) для выработки и закрепления сидячей позы, профилактики ортопедических осложнений и для комфорта пациента при организации его досуга.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корсет состоит из полиэтиленовой гильзы, подголовника и элементов крепления корсета на пациенте. Внутренняя поверхность гильз смягчена подкладкой из пенополиэтилена, поверх которого наклеен кожзаменитель. Формовка гильзы производится по гипсовому слепку.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.1 Абсолютные противопоказания:

- развившиеся вывихи тазобедренных суставов с невозможностью рецентрации головок бедренных костей в вертлужных впадинах;
- полное отсутствие реакции опоры.

3.2 Относительные противопоказания:

- значительные деформации позвоночника, затрудняющие размещение пациента в сидячей позе;
- выраженные насильственные движения (гемипализм, атетоз), препятствующие фиксации пациента в данной позе и не исключающие риск падения;
- эписиндром с частыми приступами.

3.3 Временные противопоказания:

- пролежни или заболевания кожных покровов в стадии обострения.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием корсета необходимо одеть пациента в легкую одежду и, по медицинским показаниям, в ортопедическую обувь.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Усадить пациента в корсет-сиденье.
- Затем симметрично разместить следующие сегменты: головной, позвоночный и тазовый, сохраняя физиологические изгибы позвоночника в саггитальной плоскости. С помощью дополнительных приспособлений добиться положения, в котором пациент удерживает голову, позволяя сохранять ее подвижность, обеспечивая хорошую зрительную ориентацию
- Крепления корсета располагаются на груди и в области таза. Грудь фиксируется нагрудником при помощи ленты с застежкой «Контакт», в области таза – поясом со смягчающей накладкой, избегая надавливания на грудь и живот.
- Крепления должны обеспечивать надежное удержание позы, сохраняя возможность совершения произвольных движений и управления ими. Крепление корсета не должно оказывать болевого воздействия на пациента.
- Необходимо регулярно (ежечасно) осматривать кожу пациента для выявления потертостей и склонности к пролежням (гиперемии).
- Пользоваться корсетом следует строго в соответствии с указаниями лечащего врача.
- Пациент должен пользоваться корсетом при необходимости нахождения в сидячем положении (во время игр, обучения, рисования, еды и т.д.). Общее время нахождения в корсете не должно превышать 4-5 часов в день, разделенных на сеансы, соответствующие проведению любого вида деятельности.


И.о. директора предприятия




6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Корсет необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.
- Корсет необходимо оберегать от соприкосновения с горячими предметами и от воздействия растворителей, щелочей, кислот и красящих веществ.
- При необходимости корсет рекомендуется мыть теплой мыльной водой с последующей просушкой на воздухе.
- Регулировка креплений и прочие виды ремонта производятся на протезно-ортопедическом предприятии.
- Самостоятельная разборка и ремонт корсета запрещены.
- Корсеты хранятся в сухих, отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 10 до плюс 25⁰ С и относительной влажности не выше 75 %.

И.о. директора предприятия

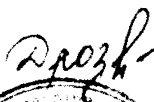

И.К. Дроздина

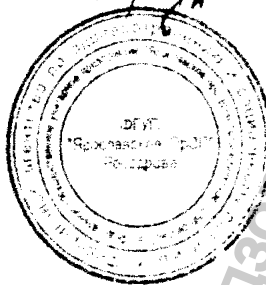

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru